

Neo Spectra™ ST Effects

Универсальный реставрационный композитный материал

 **Перейти в магазин Эль Дент и заказать:** 

Новый уровень. Просто. Эстетично

В эстетически сложных реставрациях передних зубов композит Neo Spectra™ ST Effects дополняет базовый композит Neo Spectra™ ST в технике упрощенного послойного нанесения.

- Когда требуется меньшая прозрачность, опакующие оттенки дентина D1 и D3 композита Neo Spectra™ ST Effects сочетаются с **универсальными оттенками CLOUD shade** A1-A4 композита Neo Spectra™ ST.
- **Эмалевый оттенок** E1 композита Neo Spectra™ ST Effects при необходимости помогает создать эффект прозрачного режущего края.
- Сферический наполнитель, входящий в состав композитов Neo Spectra™ ST и Neo Spectra™ ST Effects, позволяет использовать их в технике упрощенного послойного нанесения.

Факты

1 из **3**

опрошенных отметили, что первое, на что они обращают внимание на лица других, – это зубы².

более
1/3

практикующих стоматологов считают подбор цвета и общий эстетический результат наиболее сложным аспектом композитной реставрации передних зубов³.


A2

Один из пяти универсальных оттенков CLOUD shade базового композита Neo Spectra™ ST¹

D1


Один из двух оттенков дентина композита Neo Spectra™ ST Effects для дополнительной опакующести

Техника упрощенного послойного нанесения композитов Neo Spectra™ ST

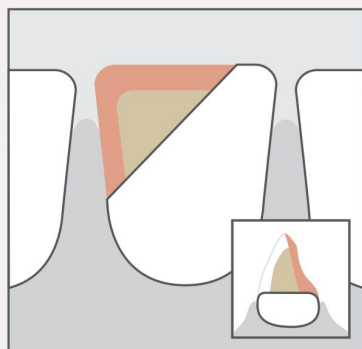


Опакующие оттенки и универсальные оттенки CLOUD shade

Небная стенка и апроксимальные поверхности восстанавливаются одним из универсальных оттенков CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST. Дентинное ядро восстанавливается опакующими оттенками Neo Spectra™ ST Effects

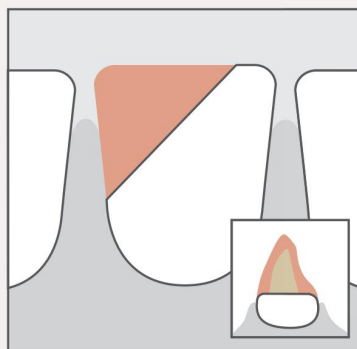

Универсальные оттенки CLOUD shade

Вестибулярная поверхность полностью восстанавливается одним из универсальных оттенков CLOUD shade базового композита Neo Spectra™ ST

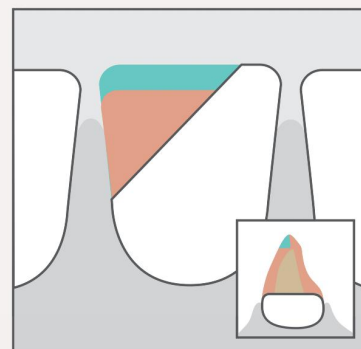

Прозрачный оттенок эмали (опционально)

Для создания эффекта большей прозрачности на вестибулярной поверхности в области режущего края используется эмалевый оттенок композита Neo Spectra™ ST Effects

¹ Универсальные оттенки CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST перекрывают всю шкалу оттенков VITA® (не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona).

² <http://www.melbourneorthodontics.com/educational/study-7-ways-smiles-affect-first-impressions/>.

³ The Key Group, Inc., 2018.

Neo Spectra™ ST Effects

Универсальный реставрационный композитный материал

Оптимизируйте запасы композитов с помощью сочетания композитов Neo Spectra™ ST + Neo Spectra™ ST Effects в технике упрощенного послойного нанесения



Информация для заказа

Neo Spectra™ ST Effects выпускается только в высокой вязкости HV (high viscosity).

Стартовый набор компьютер Neo Spectra™ ST Effects

607.01.940

24 компьютеры HV (высокой вязкости) по 0,25 г (12 × D1, 8 × D3, 4 × E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Effects

607.01.950

3 шприца HV (высокой вязкости) по 3 г (1 × D1, 1 × D3, 1 × E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



Рефиллы HV (высокой вязкости) Neo Spectra™ ST Effects

D1 (используйте с A1 и A2)
D3 (используйте с A3, A3.5 и A4)
E1 (используйте с A1, A2, A3, A3.5 и A4)

Компьютеры

16 × 0,25 г
607.01.942
607.01.943
607.01.941



Шприцы

1 × 3 г
607.01.952
607.01.953
607.01.951

