

# Flairesse

## Prophylaxis varnish



[Перейти в магазин Эль Дент и заказать:](#)

0482

### Инструкция по применению:

Русский

#### Описание продукта

Лак, устойчивый к воздействию влаги и слюны, предназначенный для обработки сверхчувствительных зубов и наносимый на зубную эмаль и дентин в рамках профилактической обработки. Профилактический лак Flairesse Prophylaxelack предлагается в стандартной банке или в тубике с двумя различными вкусовыми оттенками.

#### Показания

- Обработка сверхчувствительных зубов.
- Облитерация дентинных канальцев после препарирования кариозных полостей.
- Обработка сверхчувствительных шеек зубов и дентина корней.
- Защитный лак для предупреждения кариеса.
- Реминерализация при начальном кариесе.

#### Противопоказания

Материал нельзя применять,

- если существует аллергия к составляющим веществам или контактная аллергия,
- если пациент не может контролировать глотательный рефлекс,
- если у пациента изъязвлена десна,
- если у пациента стоматит.

#### Общие меры предосторожности:

- Предназначен исключительно для применения в стоматологии.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не проглатывать!
- Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с глазами немедленно и тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости проконсультироваться с врачом.

#### Побочные действия

- У пациентов с бронхиальной астмой применение продукта в редких случаях может привести к нарушениям дыхания.
- Нанесение на большую площадь в редких случаях может привести к отеку десны.
- Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте и рвотным позывам.

#### Взаимодействие

- После применения лака на время до 24 часов следует отказаться от использования средств, содержащих фториды.
- После применения лака пациенты, использующие регулярное систематическое фторирование, должны отказаться от этих средств на 2 – 3 дня.

#### Совет по нанесению:

- ▶ Unit Dose и тубик имеют оригинальную укупорку упаковки. Перед первым использованием обратить внимание на целостность оригинальной укупорки упаковки.

#### Рекомендации по применению:

**Указание:** Каждая упаковка содержит достаточно материала для одной профилактической обработки. Каждую упаковку разрешается использовать только для отдельного пациента.

1. Удалить зубной камень и бляшки.
2. Высушить обрабатываемую поверхность.
3. С помощью ушка снять со стандартной банки оригинальную укупорку и выбросить ее.
4. Извлечь кисточку и тщательно перемешать ею лак.
5. Отогнуть кисточку по усмотрению для обработки.
6. Нанести на обрабатываемый участок равномерный тонкий слой лака.
7. Дать соответствующие рекомендации пациенту.

**Указание:** информировать пациента о том, что для обеспечения воздействия лака, в течение 4 часов он не должен:

- принимать твердую пищу,
- употреблять алкогольные напитки,
- полоскать рот средствами, содержащими алкоголь,
- чистить зубы,
- пользоваться зубными нитями.

#### Состав

Натуральная смола, этанол, вкусовые и ароматические вещества, добавки, фторид натрия (5 %, соответствует содержанию ионов фтора 2,26 %/22.600 частей на миллион)

Не содержит аспартама, клейковины, сахарина. Содержит ксилитол. Содержит канифоль.

#### Способ и сроки хранения

- Хранить при комнатной температуре (от 20 до 25 °C/от 68 до 77 °F)
- Не хранить в холодильнике.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Не использовать по истечении срока годности.

#### Форма выпуска:

##### Unit Dose

Полная упаковка содержит 35 отдельных порций по 0,40 мл с аппликационными кисточками и продается со следующими вкусовыми добавками:

Мята	REF 220404
Дыня	REF 220405