

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для изготовления хирургических и десневых повязок. Используйте COE-PAK там, где необходима периодонтальная повязка.

ПРОТИВООКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- а) При использовании материала в форме, не подразумевающей автозамешивания, возьмите блок для замешивания COE и шпатель. Не используйте жесткий или узкий шпатель. Очень важно тщательно замешивать материал. Легче всего это сделать, используя широкий, гибкий шпатель.
- б) При использовании COE-PAK AUTOMIX NDS установите картридж в GC Cartridge Dispenser II и присоедините смешивающую насадку. Выдавите на блок для замешивания полоску COE-PAK требуемой длины. (Не используйте порцию материала больше, чем извлекается 4-мя нажатиями на рукоять диспенсера). Смешивающую насадку AUTOMIX NDS оставьте на месте до следующего применения материала.
2. Для обычной формы выпуска: Выдавите из тюбиков базы и катализатора полоски равной длины. Замешивайте материал 30-45

секунд, или до достижения однородного состояния. Если требуется более жесткая повязка, перед замешиванием добавьте небольшое количество порошка оксида цинка к розовой пасте (катализатору).

3. Используя шпатель, придайте замешанной пасте цилиндрическую форму.

4. Слегка смажьте пальцы вазелином, ланолином, кольдкремом, либо смочите водой, и попробуйте замешанную пасту на липкость (она должна потерять липкость через 2-3 минуты; 1 минуту в случае применения версии Hard & Fast). ПРИМЕЧАНИЕ: COE PAK AUTOMIX NDS можно накладывать примерно через 30 секунд. Смазывать пальцы не требуется.

5. С COE-PAK можно работать и придавать ему форму через 2-3 минуты после замешивания. Кончиками пальцев скатайте цилиндрическую заготовку на блоке для замешивания (1 минута в случае применения версии Hard & Fast), затем снимите её с блока.

6. Рабочее время COE-PAK составляет 10-15 минут (5-8 минут в случае применения версии Hard & Fast). В течение этого времени его можно использовать обычным образом: формировать шнуры или придавать другую желаемую форму.

7. В течение рабочего времени COE-PAK имеет высокие когезионные свойства. Из него можно сформировать шнуры практически любого диаметра для легкого нанесения на ткани полости рта и зубы.

СРАВНЕНИЕ COE-PAK / COE-PAK HARD & FAST / COE-PAK AUTOMIX NDS:(полоски равной длины, замешивание ½ минуты)

	COE-PAK REGULAR	COE-PAK HARD & FAST	COE-PAK AUTOMIX NDS
Готовность к использованию после замешивания	3 минуты	1 минута	30 секунд
Консистенция	пластичная	жесткая, но пластичная	пластичная
Рабочее время	10-15 минут	5-8 минут	минимум 8 минут
Способность кусков материала склеиваться между собой	10-15 минут	5-8 минут	8-12 минут
Окончательная твердость	30 минут (материал все еще эластичный, но не ломкий)	10 минут (намного жестче, чем COE-PAK, но не ломкий)	10 минут

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Известны случаи чувствительности к некоторым компонентам данного продукта. Отмеченная чувствительность колеблется от простого покраснения кожи до сыпи, возникновения отеков и тошноты и/или рвоты. Перед использованием материала врач должен убедиться в отсутствии такой чувствительности у конкретного пациента.

2. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

3. При попадании материала на кожу промойте пораженные места водой с мылом. Если появилось раздражение, обратитесь к врачу соответствующей специализации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения с картриджем NDS, New Delivery System (Новая система извлечения), рекомендован диспенсер GC Cartridge Dispenser II.

ХРАНЕНИЕ:

Храните COE-PAK в сухом месте при комнатной температуре (70-77F; 21-25C).

Максимальный срок годности данного материала составляет 24 месяца от указанной даты производства.

УПАКОВКИ:

Тюбики

1. Упаковка COE-PAK Standard (или Regular)
Тюбик базы 90 г, тюбик катализатора 90 г
2. Упаковка COE-PAK Hard and Fast
Тюбик базы 90 г, тюбик катализатора 90 г

Картриджи

1. Картриджи COE-PAK AUTOMIX NDS 2 штуки
2. Картриджа (48 мл каждый), 12 смешивающих насадок
2. Картриджи COE-PAK AUTOMIX NDS 8 штук
- 8 картриджей (48 мл каждый), 12 смешивающих насадок