

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

GC Fuji PLUS CONDITIONER является раствором для удаления загрязняющего слоя, разработанным для применения в комбинации со стеклоиономерным фиксирующим цементом GC Fuji PLUS. Раствор помогает усилить адгезию GC Fuji PLUS к твердым тканям зуба.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. После препарирования зуба нанесите GC Fuji PLUS CONDITIONER на рабочую поверхность на 20 секунд с помощью ватного тампона или губки.
2. Тщательно промойте водой и просушите. НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ.
3. Продолжите лечение, следуя инструкции по применению GC Fuji PLUS.
4. Сразу после применения препарата плотно закройте бутылочку.

#### ХРАНЕНИЕ

Храните препарат при температуре 4-25°C (39.2-77.0°F).

(Срок годности: 2 года от даты производства)

#### УПАКОВКИ

Бутылочка 7 г (6.5 мл)

#### ВНИМАНИЕ

1. В случае контакта с тканями полости рта и кожей, немедленно промойте водой пораженное место.
2. В случае попадания в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
3. GC Fuji PLUS CONDITIONER содержит 2% хлорид железа. Не рекомендуется применять GC Fuji PLUS CONDITIONER в сочетании с медикаментами, содержащими элинефрин, поскольку это может вызвать окрашивание тканей полости рта.