

**gingifast**



 Перейти в магазин Эль-Дент и заказать: 

**Technical**  
A-Silicone for Gingival Mask

**Zhermack®**  
TECHNICAL 

# gingifast elastic

Эстетичная натуральность.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Использование поливинилсилоксана с системой **автоматического смешивания** для **имитации десны** на модели позволяет **за короткий срок** получить правильную морфологию при проектировании несъемного протеза.

## ЭСТЕТИКА

**GINGIFAST ELASTIC** позволяет получить **эстетический результат** благодаря своей **полупрозрачности** и наличию васкулярных прожилок, придающих ему натуральный вид.



1 Мастер-модель с матричным оттиском из Zetalabor



2 Нанесение сепаратора Gingifast Separator на матрицу из Zetalabor



3 Участок мастер-модели, обработанный для нанесения Gingifast Elastic



4 Установка матрицы из Zetalabor на модель и введение Gingifast Elastic



5 Фрагмент десневой маски после окончательной обработки



6 Готовая работа на мастер-модели



# gingifast rigid

Универсальный и удобный при фрезеровке.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Имитация десны, используемая в **ИМПЛАНТОЛОГИИ**, воспроизводит состояние десневой ткани для определения формы пришеечного контура и нижней кромки протеза.

## ТВЕРДОСТЬ

**Сбалансированная твердость** облегчает **фрезеровку** краев во время финишной обработки десневой маски на модели.




1 Подготовка оттиска



2 Нанесение сепаратора *Gingifast Separator* на оттиск



3 Фрагмент носика канюли, погруженного в материал во время выдавливания

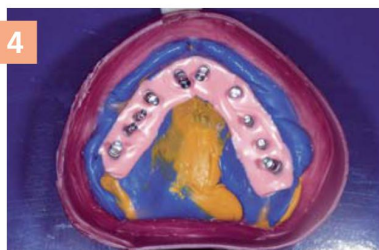

4 Оттиск, подготовленный для отливки модели



5 Фрагмент воспроизведенной десны



6 Простота фрезеровки



## Упаковка

C401500 GINGIFAST ELASTIC	2 x картриджи 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников +12 желтых интраоральных канюль + 1 x Separator 10 мл + 1 сепаратор
C401520 GINGIFAST RIGID	2 x картриджи 50 мл + 12 желтых смесительных наконечников +12 желтых интраоральных канюль + 1 x Separator 10 мл + 1 сепаратор

## Аксессуары

C202100 DISPENDER D2	Диспенсер D2 - 1:1
U100210 плунжер	Зубчатая рейка для диспенсера D2 - 1:1
C202070 MIXING TIPS SMALL	48 желтых смесительных наконечников
C202090 ORAL TIPS	48 желтых интраоральных канюль
C400887 SEPARATOR FOR GINGIFAST	1 x Separator 10 мл