

Отбеливание



Opalustre® и OpalCups™

ХИМИЧЕСКАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ АБРАЗИВНАЯ СУСПЕНЗИЯ

2012¹



Насадка White Mac Tip

- Удаляет поверхностные белые и коричневые пятна
- Минимально инвазивное лечение флюороза
- Прямая подача, без загрязнений
- Результат после одного сеанса
- Автоклавируемая чашечка OpalCup минимизирует брызги


Opalustre – вязкая суспензия 6,6% соляной кислоты, которая содержит микрочастицы карбида кремния. Это сочетание обеспечивает химическое удаление пятен и аккуратную механическую шлифовку эмали. Полировочные чашечки OpalCup со щетинками используются для микроабразивной очистки с помощью Opalustre, являются более агрессивным подходом и минимально изменяют контуры эмали. Чашечки для финишной обработки OpalCup используются с Opalustre для микрополировки только что обработанной поверхности эмали. Оба типа чашечек OpalCup можно обрабатывать в автоклаве с ограниченным количеством циклов.

Области применения

Используйте Opalustre и OpalCups для быстрого устранения дефектов эмали, вызванных декальцированием, которые находятся на глубине не более 0,2 мм. Идеально подходит для отбеливания поверхностных белых и коричневых пятен на эмали, появившихся в результате ее деминерализации и флюороза.²



После химической и микроабразивной обработки поверхность выглядит естественно.

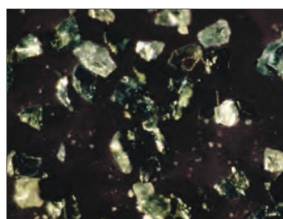


Микрочастицы карбида кремния, которые входят в состав Opalustre.

[Перейти в магазин Эль-Дент и заказать](#)

Инструкции



До.

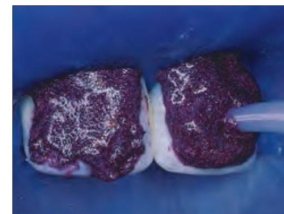

После наложения раббердама нанесите шприцем Opalustre на изменившую цвет эмаль.



Используйте чашечку со щетинками, чтобы прижать Opalustre к поверхности зуба. Рекомендуется проводить периодические полоскания и осмотр.



После микроабразивной обработки эмали и 21-дневного курса домашнего отбеливания Opalescence.



Courtesy of Dr. Ted Cull


Изолируйте зубы с пятнами, используя OpalDam. Нанесите Opalustre прямо из шприца, используя насадку White Mac Tip.



Прижимайте чашечку OpalCup к поверхности эмали на малой скорости.



Удалите Opalustre водно-воздушной струей. Не забудьте провести вакуумную аспирацию. Проверьте, не нужна ли повторная обработка.

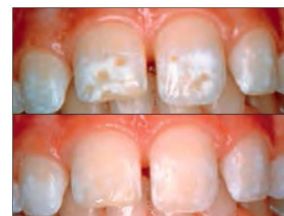

Результат обработки эмали с помощью Opalustre. Верхнее фото: до. Нижнее фото: после.