

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Пломбирование полостей на прикорневых поверхностях.
2. Пломбирование полостей по III и V Классу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Прямое перекрытие пульпы.
2. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ

- a) Отпрепарируйте полость, пользуясь стандартными методами концепции Минимальной Интервенции. Выраженная механическая ретенция не требуется. Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция.
- b) Нанесите GC CAVITY CONDITIONER (10 секунд) или GC DENTIN CONDITIONER (20 секунд) на подготовленные поверхности с помощью ватного тампона или губки.
- c) Тщательно промойте водой. Просушите ватным тампоном или слегка обдуйте воздухом без примесей. НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Наилучшие результаты достигаются, если поверхность зуба выглядит влажной (блестящей).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Фуджи VIII	Фуджи VIII в капсулах
Соотношение порошок/жидкость (г/г)	3.2 / 1.0	0.34 / 0.10
Время замешивания (сек)	25-30"	10"
Рабочее время (мин, сек)	1'30"	1'30"
Общее время отверждения (мин, сек)	2'10"	2'10"
Время начала финишной обработки (при t 37°C, от начала замешивания) (мин, сек)	6'00"	6'00"

ПОДГОТОВКА К ЗАМЕШИВАНИЮ Фуджи VIII

- a) Стандартное соотношение порошок / жидкость составляет 3.4 г / 1.0 г (1 полная ложечка порошка на 1 каплю жидкости).
- b) Для более точной дозировки перед каждым взятием порошка встряхивайте бутылочку, слегка постукивая ею о ладонь. Не трясите и не переворачивайте.
- c) Прежде чем выдавливать жидкость, убедитесь, что носик бутылочки чистый и сухой. Поверните бутылочку в горизонтальное положение и подержите так несколько секунд, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем переверните бутылочку и, держа ее вертикально, осторожно выдавите каплю жидкости без пузырьков.
- d) Бутылочки плотно закрывайте сразу же после использования.

ЗАМЕШИВАНИЕ

Поместите необходимое количество порошка и жидкости на бумагу для замешивания. С помощью пластикового шпателя разделите порошок на 2 равные части. Замешайте первую порцию со всей жидкостью в течение 10 секунд. Затем добавьте оставшийся порошок и тщательно замешайте весь материал в течение еще 15-20 секунд (общее время – не более 30 секунд). Рабочее время составляет 1 минуту 30 секунд от начала замешивания при 23°C (73.4°F). Повышение температуры сокращает рабочее время.

РЕСТАВРАЦИЯ

- a) Внесите цемент в подготовленную полость с помощью шприца или другого подходящего инструмента. Объем материала должен слегка превышать объем полости. Избегайте образования пузырьков воздуха.
- b) Придайте примерную форму и наложите матрицу.
Примечание: Если матрица не используется, объем материала должен слегка превышать объем полости.
- c) После отверждения (спустя 2 минуты 10 секунд) удалите матрицу и сразу же нанесите слой GC Fuji VARNISH (высушить струей воздуха), или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать в течение 10 секунд), или G-COAT PLUS (фотополимеризовать в течение 20 с.).

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

- a) Окончательную обработку реставрации с водяным охлаждением, применяя стандартную технику, можно начинать спустя примерно 6 минут от начала замешивания.
- b) По окончании снова нанесите защитный слой GC Fuji VARNISH (высушить струей воздуха), или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать в течение 10 секунд), или G-COAT PLUS (фотополимеризовать в течение 20 секунд).

УПАКОВКА

1. Упаковка типа 1-1: 15 г порошка (1), 8 г (6.8 мл) жидкости (1), ложечка для порошка, блок для замешивания (№ 22), пластиковый шпатель.
2. Бутылочка 15 г порошка с ложечкой.
3. Бутылочка 8 г (6.8 мл) жидкости.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном и прохладном месте (4-25°C). Срок годности: порошок 3 года, жидкость 2 года, капсулы 2 года от указанной даты производства)
ОТТЕНКИ: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4. Оттенки располагаются согласно оттеночной шкале Vita®.*
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При попадании материала на слизистые полости рта или на кожу немедленно удалите материал губкой или ватным тампоном, смоченным в спирте, а затем промойте водой. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу. НЕ СМЕШИВАЙТЕ порошок или жидкость с компонентами других стеклоиономерных цементов. Этот материал не следует применять в комбинации с препаратами, содержащими эвгенол, так как он может ингибировать отверждение и бондинг материала.

АКТИВАЦИЯ КАПСУЛ И ЗАМЕШИВАНИЕ Фуджи VIII в капсулах

- a) Перед активированием потрясите капсулу или постучите ею о твердую поверхность, это разрыхлит порошок.
- b) Для активирования капсулы вдавите плунжер до уровня тела капсулы. Сразу же установите капсулу в металлический пистолет GC Capsule Applier и один раз нажмите на рукоятку). Теперь капсула полностью активирована.
Примечание: Активация капсулы проводится непосредственно перед замешиванием в смесителе, и капсула сразу же используется.
- c) Сразу вставьте капсулу в смеситель и замешивайте в течение 10 секунд (+/- 4000 об/мин).
- d) Сразу извлеките капсулу с замешанным материалом из миксера и установите в GC Capsule Applier.
- e) Нажмите два раза на рукоятку, чтобы зафиксировать капсулу, затем выдавливайте материал. Рабочее время составляет 1 минуту 15 секунд от начала замешивания при 23°C (73.4°F). Повышение температуры сокращает рабочее время.

ТЕХНИКА РЕСТАВРАЦИИ

- a) Выдавите цемент непосредственно в подготовленную полость таким образом, чтобы материала было чуть больше объема полости. Избегайте образования пузырьков воздуха.
- b) Произведите оконтуривание и наложите матрицу.
Примечание: Если матрица не используется, объем материала должен быть чуть больше объема полости.
- c) После отверждения материала (2 минуты 10 секунд) удалите матрицу и сразу же нанесите слой GC Fuji VARNISH (высушить струей воздуха) или GC Fuji COAT LC (фотополимеризовать).
Примечание: 1) Чтобы придать носику капсулы правильное положение, поверните пальцами тело капсулы.
2) Чтобы извлечь использованную капсулу из пистолета, нажмите на освобождающую кнопку. Выньте капсулу, поворачивая её по часовой стрелке и смещая вверх.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

- a) Окончательную обработку реставрации с водяным охлаждением можно начинать примерно через 6 минут от начала замешивания, пользуясь стандартными методами.
- b) По окончании нанесите защитный слой GC Fuji VARNISH или GC Fuji COAT LC.

УПАКОВКА

1. Упаковка одного оттенка: 50 капсул.
2. Ассортиментная упаковка: 50 капсул (по 10 капсул оттенков A2, A3, A3.5, B2, B3).
Среднее содержание материала в капсуле: 0.34 г порошка и 0.10 г (0.085 мл) жидкости.
Минимальный объем замешанного материала, выдавливаемого из капсулы: 0.10 мл.