

Abscess Remedy Paste

Бактерицидная рентгенконтрастная паста для временной obturации корневых каналов

Состав

Крезол 9%, коричневое масло 5,2%, параформальдегид 2,5%, вспомогательные вещества до 100%.

Описание

Abscess remedy paste — рентгеноконтрастная нерезорбируемая паста для временного пломбирования корневых каналов. Материал обладает бактерицидным и противовоспалительным действием.

Показания

- ▶ Дезинфекция корневых каналов при лечении хронического язвенного пульпита (K04.4) и некроза пульпы (K04.1)
- ▶ Временное пломбирование корневых каналов после пульпэктомии в случаях отсроченного постоянного пломбирования
- ▶ В качестве лечебной прокладки при лечении гиперемии пульпы

Способ применения

- ▶ Провести пульпэктомию или некрэктомию с последующей механической и медикаментозной обработкой канала, просушить
- ▶ Внести пасту в канал при помощи ручных инструментов или каналонаполнителя. Избегать образования пузырьков воздуха и выхода материала за верхушку корня
- ▶ При отсроченном пломбировании каналов после пульпэктомии — оставить под повязкой до следующего посещения. После некрэктомии материал оставляют под повязкой минимум на 7 дней. За это время значительно снижается остаточная болезненность и бактериальная обсемененность. При необходимости, временное пломбирование можно повторить 1-2 раза с интервалом в несколько дней
- ▶ Постоянное пломбирование канала проводится после тщательного удаления временной пасты, адекватной механической и медикаментозной обработки

Примечание

Abscess remedy paste используется как препарат для дополнительной медикаментозной обработки при дезинфекции каналов и применяется на этапе эндодонтического лечения. Препарат не пригоден для постоянной obturации корневых каналов.

Меры предосторожности

Содержит параформальдегид и формальдегид. Препарат токсичен при приеме внутрь и вдыхании. При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу. В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу. В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему

 [Перейти в магазин Эль Дент и заказать!](#) 

препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 15-25°C в защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

баночка 12г

ART.

11220

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.