

Mummifying Paste

Антисептическая, нерезорбируемая рентгенконтрастная паста для пломбирования корневых каналов.

Состав

Полиоксиметилен 20%, крезол 15% рентгенконтрастный наполнитель до 100%.

Описание

Mummifying paste – нерезорбируемая рентгенконтрастная паста для временного или постоянного пломбирования корневых каналов. Используется в случаях, когда необходима мощная антибактериальная терапия для борьбы с аэробными и/или анаэробными микроорганизмами. Не содержит никаких противовоспалительных препаратов, которые в некоторых случаях могут быть противопоказаны. Поэтому существует небольшой риск развития воспаления при выведении материала за апекс. Для выраженного противовоспалительного эффекта PD рекомендует применять Endofill with Dexamethasone.

Показания

временное или постоянное пломбирование корневых каналов, особенно при невозможности полного удаления пульпы зуба.

Способ применения

- ▶ Провести девитализацию и экстирпацию пульпы, насколько это возможно. Механически и медикаментозно обработать корневой канал, просушить
- ▶ Внести пасту в корневой канал с помощью ручных инструментов или каналонаполнителя, избегая образования пор и выведения материала за апекс

В случае временного пломбирования

оставить пасту под повязкой на 5-7 дней, а затем извлечь, при необходимости используя Eugenate Desobturator для размягчения материала. Механически и медикаментозно обработать канал и провести постоянное пломбирование.

В случае постоянного пломбирования

удалить пасту из проходимой части корневого канала, запломбировать канал цинк-фосфатным цементом и провести постоянную реставрацию. Препарат можно использовать в качестве герметика с гуттаперчей, но



только в тех случаях, когда проведена полная экстирпация пульпы. Остатки пульпы могут быть причиной развития осложнений.

Меры предосторожности

Содержит полиоксиметилен.

Препарат токсичен при приеме внутрь и вдыхании. При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки.

В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов..

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в сухом, в защищенном от прямого света месте. Плотно закрывать емкость после использования.

Срок хранения XX года.

Упаковка

баночка 12 г

APT.

11560

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.