

Surgical Dressing

Антисептическая и местноанальгезирующая повязка для стоматологического применения.

Состав

Гваякол 12,2%, бензокаин 8,2%, хлорбутанола гемигидрат 5,1%, ментол 5%, тимоло иодид 4,1%, метилсалицилат 1,8%, вспомогательные вещества до 100%.

Описание

Surgical dressing — гелеобразная масса для снижения болезненности и антисептической обработки слизистой оболочки полости рта после операционных вмешательств. Нанесение препарата способствует практически моментальному устранению болезненных ощущений. Эффект сохраняется до полного растворения препарата.

Показания

- ▶ Боли в области лунок удаленных зубов и операционных вмешательств в полости рта
- ▶ Обезболивание как во время, так и после пародонтальных вмешательств
- ▶ Сухие лунки удаленных зубов
- ▶ Болезненные, инфицированные повреждения слизистой оболочки полости рта

Способ применения

Нанести необходимое количество препарата на поврежденную слизистую оболочку. При необходимости повторять аппликации в течение 7 дней.

Меры предосторожности

Не применять препарат у пациентов, страдающих аллергией на этиламинобензоат (бензокаин) или другие компоненты препарата.

В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот водой и обратиться к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C, в сухом, защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 5 года.

Упаковка

туба 25 г



только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.

