

Настенный дозатор

SM 2 Universal

 [Перейти в магазин ЭльДент и заказать:](#) 

SsM

iSchülke&Mayr

1. Монтаж

Монтаж дозатора виден на рис. 1. В качестве сверлильного кондуктора используйте кронштейн дозатора (отверстия годятся и для дозатора Schülke & Mayr SM1, а также для КН-дозатора).

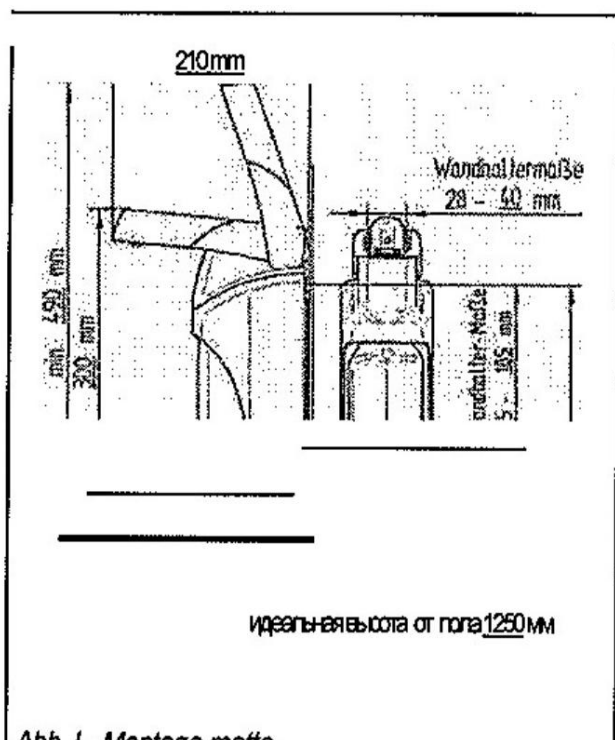


Abb. I - Montage mat

4. Установка дозирования

Объем подачи насоса может быть установлен в 3 вариантах (приблизительно 1 мл - 2 мл - 3 мл).

- Поднять рычаг
- Вариант 3 мл (среднее положение)
- Установить желаемый объем подачи и зафиксировать (рис. IV)
- Опустить рычаг

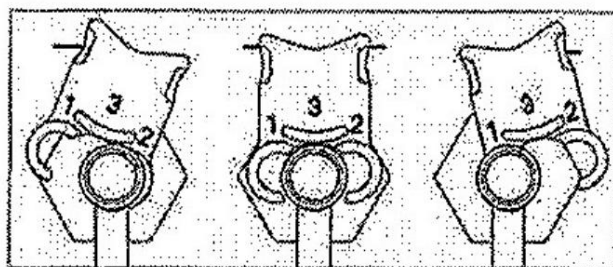


Рис. IV – установка дозир. устройства

2. Установка размера флакона

Настенный дозатор SM 2 Universal годится для флаконов 450 - 1000-мл различного формата. Положение выхода препарата соответствует установке для флакона 1000-мл (рис. II).

Если нужно поставить флакон 450/500-мл, необходимо открутить диск (A) до упора (рис. III). Положение выпуска снова устанавливается путем вкручивания до упора.

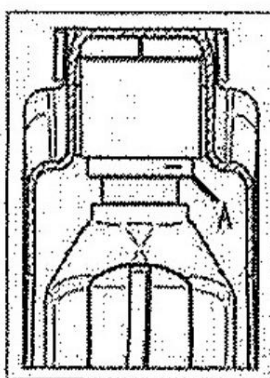


рис. II флакон 1000мл

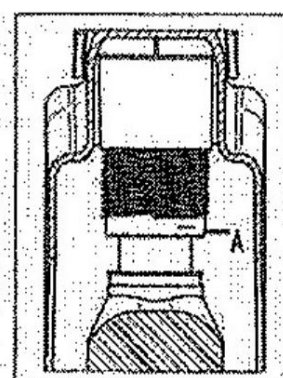


рис. III флакон - 450/500-мл

3. Установка и снятие флакона

Перед установкой флакона необходимо точно выполнить установку (п. 2). В горлышко флакона ввести всасывающий шланг. Продвинуть флакон вверх до кольца (A), продвинуть до сопротивления пружины дальше вверх, пока флакон, при небольшом усилии назад, не зафиксируется в вертикальном положении. Чтобы достичь лучшего вертикального положения для флакона 1000-мл, нужно приподнять еще раз флакон и зафиксировать. Для снятия флакон продвинуть его прямо вверх и вытащить вперед, освободив от фиксации.

5. Уход

Настенный дозатор SM 2 Universal при нормальной эксплуатации не требует никакой профилактики. Если же несмотря на это, напр. при простое, вентиль не откручивается, то после очистки и промывания теплой водой восстанавливается полная функциональность.