

## Инструкция по применению

### Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-пластмасса» по ТУ 9391-005-10614163-98

РУ № ФСР 2009/04528 от 19.03.2009 г.

#### Назначение

Лак разделительный зуботехнический «Изолак» гипс-пластмасса» является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от акриловых пластмасс, применяемых при изготовлении зубных протезов в зуботехнических лабораториях.

#### Способ применения

Перед нанесением «Изолак» гипс-пластмасса» необходимо очистить и обезжирить поверхность гипсовой модели. Требуемое количество лака налить в отдельную ёмкость и кисточкой равномерно нанести на остывшую поверхность гипсовой модели, выдержать в течение 1-2 минут. При необходимости повторить обезжиривание и нанести лак заново. Внимание! Не сливать, использованный «Изолак» гипс-пластмасса» во флакон. Не опускать кисточку во флакон с лаком, это приводит к порче всего материала.

#### Условия хранения и транспортирования

«Изолак» гипс-пластмасса» должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +40°C. Условия транспортирования по группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 при температуре от -15 до +50°C.

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие свойств «Изолак» гипс-пластмасса» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### Техническое обслуживание и ремонт

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

#### Утилизация отходов

Отходы при использовании изделия «Изолак» гипс-пластмасса» в виде остатков лака и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А. Неиспользованное изделие по истечении срока годности утилизируется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

#### Комплект поставки

1. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (125±5) мл - 1 шт; Этикетка-инструкция - 1 шт.
2. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (500±5) мл - 1 шт; Этикетка-инструкция - 1 шт.
3. Флакон с лаком разделительным, закрытый крышкой объемом (1000±5) мл - 1 шт; Этикетка-инструкция - 1 шт.

**Срок годности:** 3 года.