

## Инструкция по применению

### Силановый праймер

ТУ 9391-031-40151387-2016

#### СОСТАВ

Раствор метакрилата силана в органическом растворителе, бифункциональный метакриловый мономер содержащий фосфатные группировки, вода.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Силановый праймер предназначен для активации поверхности и улучшения адгезии конструкций из прессованной керамики и неблагородных металлических сплавов при постоянной фиксации композитными цементами. Предварительная обработка ортопедических конструкций силановым праймером позволяет создать на поверхности активные центры, обеспечивающие долговременное соединение с высокой адгезионной прочностью

#### СВОЙСТВА

Силановый праймер – прозрачная подвижная жидкость с характерным запахом, светло желтого цвета без посторонних механических примесей.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

##### **Для конструкций из прессованной керамики.**

На подготовленную поверхность керамики нанесите тонкий равномерный слой 9% геля плавиковой кислоты (например, Керamikгеля). Время травления 60 секунд. Для нейтрализации травильного геля, содержащего плавиковую кислоту, рекомендуется нанести на его поверхность слой Барьерного геля и аккуратно перемешать до видимого прекращения реакции. Удалите нейтрализованный слой геля и тщательно промойте струей воды примерно 1 минуту и просушите область травления. Протравленная поверхность должна быть матовой.

Нанесите на протравленную поверхность силановый праймер с помощью микроаппликатора и оставьте на 60 секунд. Просушите поверхность струей воздуха.

Нанесите цемент для фиксации в соответствии с инструкцией по применению, не допуская загрязнения поверхности.

##### **Для конструкций из неблагородных сплавов металла.**

Проведите пескоструйную обработку поверхности конструкции до равномерно матового вида.

Очистите в течение 1 минуты в ультразвуковой ванне, тщательно промойте струей воды и высушите воздухом.

Нанесите на подготовленную поверхность силановый праймер с помощью микроаппликатора и оставьте на 60 секунд.

Просушите поверхность струей воздуха.

Нанесите цемент для фиксации в соответствии с инструкцией по применению, не допуская загрязнения поверхности.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

##### **«Силановый праймер» в составе:**

- силановый праймер во флаконе - 1 шт.

принадлежности:

- микроаппликаторы стоматологические - не более 50 шт.

- кювета 3-х местная - 1 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

- групповая тара (коробка) - 1 шт.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При соблюдении правил применения побочных действий и противопоказаний нет.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо строго выполнять инструкцию по применению.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования - по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур +(5÷25) °С.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Силановый праймер в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур +(5÷12) °С в сухом защищенном от прямых солнечных лучей помещении.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала всем требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении в упаковке предприятия-изготовителя устанавливается при хранении в интервале температур +(5÷12) °С - 2 года со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Номер партии соответствует дате производства материала и указывается на упаковке.

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных медицинских комплексах.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Силановый праймер, упаковка и принадлежности входящие в набор, не требуют специальных мер предосторожности при уничтожении.

Отходы относятся к классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПин 2.1.7.2970.