



# 3M ESPE Filtek™ Z550

Nano Hybrid Universal Restorative  
Материал универсальной стоматологической наногибридной реставрационной композиции  
Nano Hybrid Universal Restorative  
Nano-hibrid univerzális főmázanyag  
Univerzális, nanohibridnyóvó anyag kompozitovy  
Material compozit universal nano hibrid pernto  
Univerzálno nanohibridný výrbový materiál



Перейти в магазин Эль Дент и заказать

- Глубина реставрации:** Имитирование цвета реставрационного материала зависит от его толщины. Варианты оттенков следует брать из руководства в зависимости от степени их сходства и глубины реставрации.
- Проб:** Нанесите выбранный оттенок реставрационного материала на непрозраченный зуб. Проведите манипуляции для достижения соответствующей толщины слоя и местоположения реставрации. Полимеризуйте материал. Оцените оттенок под различными источниками света. Удалите реставрационный материал с непрозраченного зуба зондом. Повторите эту процедуру до тех пор, пока не получите приемлемое совпадение оттенков.
- Изоляция:** Предпочтительным методом изоляции является коффердам. Также можно использовать ватные валики и спонжосот.

- С помощью мастер-модели проверьте реставрацию на отсутствие дефектов, микроразрывов и на точность краевого прилегания (с мезиальной, дистальной и окклюзионной сторон). При необходимости исправьте недостатки и ополосните.

### 3. Стоматологическая операционная процедура

- Придайте шероховатость внутренним поверхностям непрямых реставраций.
- Промойте конструкцию в мыльном растворе в ультразвуковой ванне и тщательно высушите.
- Цементирование: Зафиксируйте конструкцию с помощью композитного цементпроизводства компании 3M ESPE согласно инструкции производителя.

### Хранение и применение

- Данный материал должен храниться при комнатной температуре. Если материал хранился в холодильной камере, он должен нагреться до комнатной температуры перед использованием. Срок хранения материала при комнатной температуре 30 месяцев. Постоянная окружающая температура выше 27 °C/80 °F может сократить срок хранения. См. дату истечения срока хранения на внешней упаковке.
- Не подвергать реставрационные материалы воздействию повышенных температур и интенсивного света.
- Не храните материалы вблизи продуктов, содержащих эвгенол.

### Очистка и дезинфекция

Данное изделие следует дезинфицировать с помощью дезинфекции промежуточного уровня (с использованием жидких средств) в соответствии с рекомендациями Центра по контролю заболеваний, одобренными Американской стоматологической ассоциацией.

### Справочная литература:

CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Rutala WA, Weber DJ. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).

### Утилизация

Информацию об утилизации см. в паспорте безопасности материалов (MSDS) (имеется на веб-сайте www.3MESPE.com) или в местном представительстве.

### Информация для покупателя

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от сведений, содержащихся в данной инструкции.

**Внимание:** Согласно федеральному законодательству США данный продукт может продаваться и использоваться исключительно по рецепту специалиста-стоматолога.

### Гарантийные обязательства

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИБО ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период его устранение и ответственность фирмы 3M ESPE ограничиваются ремонтом и заменой данного изделия.

### Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данного изделия, будь то прямые, косвенные, умаленные, случайные или опосредованные убытки, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежности или объективной ответственности.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

АО «3M Россия», 108811 г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, дом. 6, стр. 1  
Тел.: +74957847474



### Прямые реставрации

#### 1. Подготовка полости:

- Реставрации во фронтальном отделе:** Примените стандартные методы подготовки полости для всех реставраций класса III, IV и V.

- Реставрации в боковом и жевательном отделах:** Подготовьте полость. Широковатые и острые углы следует закруглить. Остатки амальгамы или прокладочных материалов следует тщательно удалить, поскольку они могут препятствовать проникновению света и, следовательно, нормальной полимеризации реставрационного материала.

- Защита пульпы:** Если произошло вскрытие пульпы или ситуация требует прямого покрытия пульпы, нанесите небольшое количество гидроксида кальция на вскрытый участок, а затем внесите светополлимеризуемый стеклоиономерный прокладочный материал 3M™ ESPE™ Vitrebond™ или Vitrebond Plus™. Прокладочный/базовый материал Vitrebond можно также использовать в глубоких полостях. См. инструкции по применению прокладочного материала Vitrebond.

#### 3. Установка матрицы:

- Реставрации во фронтальном отделе:** Пластиковые шпильки или матрицы для формирования коронок могут использоваться для экономии используемого материала.

- Реставрации в боковом и жевательном отделах:** Установите контурную металлическую матрицу и плотно закройте киньки. Плотно позиционируйте матрицу для акуликации проксимального контура и контактного пункта. Адаптируйте матрицу так, чтобы она закрывала приростную область, не выступая над десной.

**Примечание:** Матрицу можно установить после протравливания эмали и нанесения адгезива.

- Адгезивная система:** Следуйте инструкции производителя по протравливанию, нанесению праймера, адгезива и полимеризации.

- Внесение композита:** Следуйте инструкции в соответствии с выбранной дозирующей системой.

- Шприц:** Извлеките необходимое количество реставрационного материала на блокнот для смешивания, медленно поворачивая ручку шприца по часовой стрелке. Для предотвращения вытекания реставрационного материала после того, как его необходимо количество извлечено, поверните ручку шприца на пол-оборота против часовой стрелки и выдвиньте поршень. Сразу же закройте шприц колпачком. Если извлеченный материал не используется немедленно, необходимо защитить его от света.

- Одноразовая капсула:** Вставьте капсулу в диспенсер для реставрационных материалов 3M ESPE. Следуйте отдельной инструкции к диспенсеру и соответствующим мерам предосторожности. Нанесите материал из капсулы непосредственно в полость.

#### 6. Нанесение:

- Послойно нанесите реставрационный материал и проведите светополлимеризацию, как указано в разделе 7.

- Полость должна быть немного перелюнена, чтобы композит перекрывал края полости. Придайте форму реставрации соответствующим инструментом, предназначенным для работы с композитными материалами.

- Избегайте попадания интенсивного света на рабочее поле.

- Рекомендации по полированию боковых зубов:

6.4.1. Для полной адаптации первый 1 миллиметровый слой следует наносить и адаптировать к проксимальной стенке.

6.4.2. Для адаптации материала по дну и стенкам полости можно использовать конденсационный инструмент (шпатель).

- Полимеризация:** Реставрационный наногибридный материал Filtek Z550 предусматривает отверждение под воздействием света от галогеновой или светодиодной лампы с минимальной интенсивностью 400 мВт/см² в диапазоне 400–500 Нм. Полимеризуйте каждый слой материала, засвечивая всю его поверхность светом высокой интенсивности от источника, например световой полимеризационной лампы 3M ESPE. Во время полимеризации держите световод как можно ближе к полимеризуемому материалу. Рекомендованное время экспозиции и максимальная толщина слоя для каждого оттенка приведены в таблице ниже.

Минимальная интенсивность света 400 мВт/см²		
Оттенки	Глубина слоя	Время полимеризации
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3	2,0 мм	20 сек.
OA2, OA3	1,5 мм	20 сек.

  

Минимальная интенсивность света 1000 мВт/см²		
Оттенки	Глубина слоя	Время полимеризации
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3	2,0 мм	10 сек.
OA2, OA3	1,5 мм	10 сек.

- Контурирование:** Ошлифуйте поверхности пломбы алмазными или твердосплавными фирмами, борами или камнями. Проксимальные поверхности контурируйте шпильками 3M™ ESPE™ Sof-Lex™.

- Достижение правильной окклюзии:** Проверьте окклюзию артикуляционной бумагой. Проверьте центральные и боковые контакты при движении. Аккуратно подгоните окклюзию, удаляя излишки материала мелкозернистыми алмазным бором или камнями.

- Шлифовка и полировка:** Отполируйте реставрацию дисками для шлифовки и полировки Sof-Lex™ и белыми камнями или режущими там, где диски использовать неудобно.

### Непрямые реставрации, включая вкладки, накладки и виниры

#### 1. Стоматологическая операционная процедура

- Выбор оттенка:** Выберите подходящий оттенок реставрационного наногибридного материала Filtek Z550 перед изоляцией. Если производится реставрация глубокого дефекта, рекомендуется использовать опаловый оттенок.

- Подготовка:** отпрепаруйте зуб.

- Снятие оттиска:** После завершения препарирования снимите оттиск отпрепарованного зуба, следуя инструкциям производителя в отношении выбранного оттискового материала. Можно использовать оттисковый материал компании 3M ESPE.

#### 2. Лабораторные процедуры

- Заполните оттиск жидким гипсом. Установите плыни на обработанную поверхность, если использовалась техника оттиска в прикус. Затем соответствующими методами доведите работу до необходимого вида с помощью съемных элементов, отвечающих типу использованной техники оттиска.

- Отделите модель от оттиска. Время, через которое можно отделять модель от оттиска, зависит от использованного материала. Соответствующими методами доведите работу до необходимого вида с помощью съемных элементов, отвечающих типу использованной техники оттиска. Установите модель вместе с моделью противоположной челюсти в подходящем артикуляторе.

- Если второй оттиск не был получен, отлейте вторую модель с помощью того же оттиска. Она будет использована в качестве рабочего образца.

- Обработайте модель подготовленного зуба зуботехническим инструментом и удалите излишки и откройте края, чтобы их было легко обрабатывать. При необходимости отметьте края красным карандашом и обработайте подготовленную область гипсовым отвердителем. При необходимости наложите прокладку.

- Нанесите первую треть композита на нижнюю часть обработанной полости, не выходя за пределы, и полимеризуйте в течение 20 секунд.

- Нанесите вторую треть композита. Нанесите последнюю треть на режущую поверхность, включая контактные участки, и полимеризуйте в течение 20 секунд.

- Поместите гипсовую модель обратно в артикулятор, добавьте последнюю треть композита на окклюзионную поверхность. Нанесите немного больше композита в центре, по бокам и с окклюзионной поверхности. Это создаст мезиодистальные контакты и надлежащий окклюзионный контакт при сжатии противоположной челюсти с неполлимеризованным слоем режущего материала. Полимеризуйте светом в течение десяти секунд, затем извлеките гипсовую модель для предотвращения адгезии с прилегающими поверхностями. Завершите процесс полимеризации.

- При фиксации окклюзионного контакта извлеките излишки композита вокруг контактных участков. Сформируйте бугры и фиссуры в соответствии с окклюзионной анатомией.

- Соблюдайте осторожность при извлечении реставрации из гипсовой модели. Отделите маленькие кусочки гипсовой модели от реставрации, она должна аккуратно отделиться от затвердевшей реставрации до полного восстановления всей реставрационной поверхности.

## РУССКИЙ

### Общая информация

Материал универсальной стоматологической наногибридной реставрационной Filtek™ Z550 – это световотверждаемый рентгеноконтрастный реставрационный композит. Его можно применять для реставрации как фронтальных, так и боковых зубов. Нанопигмент универсального стоматологического наногибридного реставрационного материала Filtek Z550 является комбинация высокодисперсионного циркония/кремния и высокодисперсионных частиц кремния размером 20 Нм. Содержание частиц неограниченного наполнителя составляет 81,8 % по весу (67,8 % по объему), размер частиц кремния – 20 Нм, размер частиц циркония/кремния – 0,1 – 10 микрон. Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал Filtek Z550 содержит смолы BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA и TEGDMA. Для постоянного бондинга реставрации к структуре зуба используется стоматологический адгезив.

### Показания

Универсальный стоматологический наногибридный реставрационный материал Filtek Z550 предназначен для использования в приведенных ниже клинических ситуациях:

- Прямые реставрации передних и боковых зубов (включая окклюзионные поверхности)
- Настройка культи
- Шинирование
- Непрямые реставрации, включая вкладки, накладки, виниры

### Меры предосторожности для пациентов

В данном материале содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Не применяйте данный материал у пациентов, имеющих аллергию к акриловым смолам. В случае продолжительного контакта с мягкими тканями готовой полости обильно промойте ее водой. В случае возникновения аллергической реакции обратитесь к врачу, при необходимости удалите материал и прекратите его использование в дальнейшем.

### Меры предосторожности для персонала стоматологических клиник

В данном материале содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Для снижения риска развития аллергической реакции уменьшите время контакта с этими материалами. В частности, следует избегать контакта с неполлимеризованным материалом. При попадании на кожу всегда промойте ее обильным количеством воды с мылом. Рекомендуется работать в защитных перчатках и бесконтактной техникой. Акрилаты могут проникать через обычные медицинские перчатки. Если реставрационный материал попал на перчатку, снимите и выкиньте ее, немедленно вымойте руки водой с мылом и наденьте новую перчатку. Если возникла аллергическая реакция, обратитесь за соответствующей медицинской помощью.

Информация о 3M ESPE MSDS доступна по адресу [www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com). Дополнительную информацию можно также получить, связавшись с Вашим местным представителем компании.

### Инструкция по применению

#### Подготовка

- Очистка:** Для удаления налета зуба необходимо очистить водно-пемзовую суспензией.
- Выбор оттенка:** Перед изоляцией зуба подберите подходящий оттенок (оттенки) реставрационного материала используя стандартную шкалу для подбора оттенков VITAPAN® Classic. Точность определения оттенка может быть увеличена при сведении приведенных ниже рекомендаций.

- Оттенок:** Зубы не монохромны. Зуб можно разделить на три области, у каждой из которых будет свой характерный цвет.

- 1.1. Десневая область:** Реставрации в приростной области делаются из материала желтого оттенка той или иной интенсивности.

- 1.2. Средняя часть коронки зуба – тепло:** Реставрации в средней части зуба делаются из материала серого, желтого или коричневого оттенков различной степени интенсивности.

- 1.3. Режущая область:** Режущий край может иметь голубые или серые оттенки. Помимо этого, нужно добиться гармонии этой прорезной области со средней частью реставрируемого зуба и соседними зубами.