

3M ESPE
Single Bond Universal
Single Bond Universal DCA

Adhesive / Dual Cure Activator
 Агезив / Активатор для двойного отверждения
 Агезив / Двойнополимеризураща активатор
 Adheziv / Aktivator za dvostruko stvrdnjavanje
 Ragasztóanyag / Kettős kötésű aktivátor
 Klej / Podwójnie utwardzalny aktywator
 Adeziv / Activator de polimerizare dublă
 Lepidlo / Aktivátor podvojného tvrdnutia

Instructions for Use
Инструкция по применению
Указания за употреба
Upute za upotrebu

Felhasználási tudnivalók
Instrukcja użycia
Instruccions de utilització
Informácie pre používanie

3M Deutschland GmbH
 Dental Products
 Carl-Schurz-Str. 1
 44533 Neuss - Germany
 3M, ESPE, Clipro and Relux are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. © 2019, 3M. All rights reserved.

CE 0123

Перейти в магазин Эль Дент и заказать

Temp NE). Использование содержащих зенитов временных цементов может препятствовать процессу полимеризации Single Bond Universal в ходе окончательной цементации.

Защита пульпы
Во избежание раздражения пульпы, наносите на область, находящуюся в непосредственной близости от пульпы небольшое количество слабого связывающего гидроксида кальция. Во избежание завышения силки во время цементации последующей реставрации защиту пульпы необходимо использовать до снятия оттиска под окончательную реставрацию.

Подготовка зуба
Подготовка полости/культы зуба
Удалите опилки, образовавшиеся после препарирования, при помощи воды и немного просушите не содержащим воды и масла воздухом культо или воспользуйтесь для сушки ватными тампонами. Не пересушивайте.

После окончательной очистки полости мы не рекомендуем использовать такие вещества как десенсибилизаторы, дезинфектанты, вяжущие вещества, силанты, антисептики с содержанием ЗДТА, перекиси водорода и т.п. (за исключением хлоргексидиновых растворов). Остатки этих веществ могут оказать негативное воздействие на прочность соединения и реакцию полимеризации агезива, в особенности материалов химического и двойного отверждения.

Непрепарированная зубная эмаль
Смешайте, как обычно, эмаль (например, с помощью полировочной пасты или струйной очистки порошком) и тщательно промойте ее струюм воды.

Протравливание твердых тканей зуба (опционально)
Соответствующая клиническим требованиям сила агезии обеспечивается применением данного агезива. Однако можно достичь большей силы агезии, применяя препарат на протравливание эмали или, воспользовавшись «процедурой тотального протравливания».

Избирательное протравливание эмали
Случайное протравливание дентина не оказывает какого бы то ни было отрицательного воздействия на адгезию.
Нанесите обычно используемый, состоящий из фосфорной кислоты (около 35%) протравочный гель (например, протравочный гель Scotchbond® Universal Etchant) на препарированную или непрепарированную (если таковая присутствует) зубную эмаль и дайте протравить в течение 15 сек.
Тщательно промойте водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами; не пересушивайте.

Процедура тотального протравливания
Нанесите обычно используемый, состоящий из фосфорной кислоты (около 35%) протравочный гель (например, протравочный гель Scotchbond® Universal Etchant) на подготовленную или неподготовленную (если это имеет место быть) структуру зуба (эмаль или дентин) и дайте протравить в течение 10 сек.
Тщательно промойте водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами; не пересушивайте.

Десенсибилизация поверхности корня
Очистите, как обычно, поверхность корня (например, с помощью полировочной пасты или струйной очистки порошком).
Тщательно очистите распылением воды и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
Затем продолжите нанесение агезива Single Bond Universal.

Предварительная обработка пломб или реставраций в процессе склейки
(реставрации из композитных материалов, стеклокерамики, диоксидирированной керамики, керамики на основе оксида алюминия, металла (включая амальгаму))

Тщательно придайте шероховатость поверхности реставрации (протравить опилками, струейм оксидом алюминия (менее 40 мкм); если Вы работаете с керамикой, следует, снять глянзю до 1 мм над краем).
Тщательно очистите распылением воды и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
Не протравливайте фосфорной кислотой, так как это может ослабить адгезию к определенным материалам (например, цирконию, оксиду алюминия, металлу).
Затем нанесите дополнительный слой нет активатору.

Дозирование агезива Single Bond Universal
Дозирование из флакона
У колпачка дозирующего флакона имеется выемка для большого пальца руки, которая позволяет открыть его с одной стороны и снова закрыть другой рукой. Колпачок останется открытым, если угол разворота >90°.

Чтобы открыть флакон, возьмите его в руку, поместите большой палец руки в выемку для большого пальца руки и нажмите на колпачок с стороны, пока он не останется в открытом положении.
Держите флакон вверх дном в вертикальном положении и найдите требуемое количество Single Bond Universal в палетке для смешивания. Защищаясь находящийся в палетке для смешивания агезив от попадания света.
После использования аккуратно закройте флакон, приложив дальнюю к рычагу сверху.

При нажатии колпачок ошито зацепляется на своем месте и вору между колпачком и флаконом будет виден небольшой, овальный зазор.

Дозирование из блистера L-Рор
Внимание: Не сдвигайте блистер L-Рор при отсутствии одностороннего аппликатора.

Держите стержень одностороннего аппликатора одной рукой, закрывая отверстие блистера своим большим пальцем. Это предотвратит разбрызгивание жидкости при протравливании.
С помощью большого и указательного пальцев другой руки сожмите емкость блистера L-Рор, начиная с верхнего конца, в направлении одностороннего аппликатора.
Превратите односторонний аппликатор туа-обратно, чтобы обеспечить его полное высвобождение.

Для облегчения применения в полости односторонний аппликатор может быть согнут, все еще находясь в блистере L-Рор. Для этого необходимо выжать односторонний аппликатор из блистера настолько, чтобы было видно сужение стержня аппликатора. Согните стержень аппликатора в этом месте поверх ногтя вашего большого пальца.
Во время обработки (по повторной укладке аппликатора выдвигайте всю жидкость большим и указательными пальцами в открытый конец выдавливания.

Дозирование активатора Single Bond Universal DCA
Смешайте в палетке для смешивания требуемое количество Single Bond Universal DCA в пропорции 1:1 (капли) с Single Bond Universal и смешайте в течение 5 сек, непосредственно перед нанесением. Защищаясь находящееся в палетке для смешивания жидкость от попадания света.

Плотно и аккуратно закройте флакон после дозирования. Если необходимо, дезинфицируйте флакон в соответствии с местными нормами гигиены.

Применение
Во время нанесения избегайте любого загрязнения кровью, слюной или десневой жидкостью. Для обеспечения достаточной сухости обработываемой области и предотвращения воздействия на мягкие ткани мы рекомендуем использовать коффердам.
Порядок действий для фиксации прямых реставраций с применением светотверждаемых композитных и компомерных материалов, интраоральной пинки реставраций из светотверждаемых композитных материалов, десенсибилизации поверхности корня, силикации полостей перед заполнением амальгамой, обработки полостей и восстановленных культи перед временным присоединением непрямых реставраций
Воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения агезива на всю структуру зуба и **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между агезивом и слизистой оболочкой полости рта.
При необходимости, повторно увлажните односторонний аппликатор во время обработки.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Осуществите отверждение агезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при работе с композитными материалами химического отверждения и композитными материалами двойного

отверждения, а также материалами для восстановления культи и цементами
В случае использования Relux Ultimate активатор не нужен, так как он уже присутствует в цементе. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению Relux Ultimate.

Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
Воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения смеси на всю структуру зуба и **втирайте ее** в течение 20 сек. Избегайте контакта между агезивом и слизистой оболочкой полости рта.
При необходимости, повторно увлажните односторонний аппликатор во время обработки.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Осуществите отверждение агезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
Согласно показаниям продолжите работу с требуемым материалом в соответствии с соответствующей инструкцией по применению.

Порядок действий при цементации непрямых реставраций и виниров с использованием агезивного композитного цемента Relux Ultimate Adhesive Resin Cement
При использовании Relux Ultimate вещества Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению Relux Ultimate.

Использование Single Bond Universal в качестве покрытия для непрямых реставраций
При использовании Relux Ultimate вещества Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению Relux Ultimate.
Подготовьте поверхность реставрации:
Протравьте стеклокерамические поверхности глянзювой кислотой в соответствии с инструкцией производителя.
Приведите шероховатость композитным, диоксидирированной керамичекой и металлическим поверхностям предлчательно в соответствии с инструкцией производителя.
Не протравливайте фосфорной кислотой, так как это может ослабить соединение с полимерным материалом (например, цирконию, оксиду алюминия, металлу).
Тщательно промойте поверхность водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
Сочетании с другим композитным цементом:
Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
Сразу же после смешивания воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения агезива на всей поверхности цементной реставрации и дайте ему **прогреарировать** в течение 20 сек. Не осуществляйте светотверждение.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Для нанесения цемента следуйте инструкции по его применению.

Использование Relux Ultimate для фиксации штифтов
При использовании Relux Ultimate вещества Single Bond Universal DCA не требуется. Пожалуйста, следуйте инструкции по применению Relux Ultimate.
Использование других композитных цементов для фиксации штифтов
Подготовьте эндодонтически обработанный корневой канал для фиксации штифта.
Проверьте посадку штифта; он должен входить на 2/3 длины корневого канала.
Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
Воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения смеси на всю структуру зуба и **втирайте ее** в течение 20 сек.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Осуществите отверждение агезива в течение 10 сек. с помощью обычно используемого устройства для фотополимеризации.
Для фиксации штифта воспользуйтесь инструкцией по применению соответствующего продукта.

Порядок действий при фиксации виниров с использованием цемента для виниров 3M ESPE Relux Veneer Cement
Поверхность фиксируемого стенокерамического винира должна быть протравлена глянзювой кислотой в соответствии с инструкцией производителя. При использовании Single Bond Universal дополнительно силиканого покрытия не требуется.
Перед нанесением агезива очистите подготовленную структуру зуба пемзовой пастой, тщательно промойте водой и высушите не содержащим воды или масла воздухом или ватными тампонами.
Проверте посадку винира с помощью пасты Relux™ Tri-It.
Капните по одной капле Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA в палетку для смешивания и смешивайте в течение 5 сек.
Воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения смеси на всю структуру зуба и **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между агезивом и слизистой оболочкой полости рта. При необходимости, повторно увлажните односторонний аппликатор во время обработки.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Осуществите светотверждение.
Используйте односторонний аппликатор для нанесения Single Bond Universal на уплотненную поверхность и **втирайте его** в течение 20 сек. с каждой поверхностью.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Аккуратно зафиксируйте винир на цемент Relux™ Veneer Cement, следуя соответствующей инструкции по применению. Удалите лишнее или слюну с края винира и произведите светотверждение в соответствии с инструкцией производителя. Мы рекомендуем осуществлять светотверждение в следующей последовательности: сначала прищечная область, затем среднюю часть и режущий край. Избегайте направления источника света в глаза.

Применение агезива со светотверждаемыми фиссурными герметиками
В отличие от композитных пломбировочных материалов светотверждаемые герметики для фиссур могут быть соединены с помощью Single Bond Universal с непрепарированной зубной эмалью без предварительного протравливания фосфорной кислотой.
Очистите поверхность, подвергнувшись обработке с помощью полировальной пасты или струйной очистки порошком (например, воспользовавшись Clipro Prophy Powder).
Воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения Single Bond Universal на уплотненную поверхность и **втирайте его** в течение 20 сек., прилагая давление. Увеличьте время втирания в случае уплотнения поверхностей большого размера. **Не сокращайте это время.** Недостаточно просто нанести и распределить агезив.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Нанесите светотверждаемый герметик для фиссур (например, Clipro Sealant).
Полимеризируйте герметик для фиссур и агезиве обычным полимеризирующим устройством; время зависит от используемого герметика для фиссур.

Использование агезива в качестве защитного лака для стеклоиономерных пломбировочных материалов
Если для придания формы использовалась матрица, то сначала удалите матрицу.
Воспользуйтесь односторонним аппликатором для нанесения Single Bond Universal на всю смоделированную полость и **втирайте его** в течение 20 сек. Избегайте контакта между агезивом и слизистой оболочкой полости рта.
При необходимости, повторно увлажните односторонний аппликатор во время обработки.
Затем направьте слабый поток воздуха поверх жидкости на 5 сек., пока она не перестанет двигаться, и полностью не испарится растворитель.
Используйте обычное полимеризирующее устройство для полимеризации агезива в течение 10 сек. с каждой поверхности пломбировочного материала.
После полного отверждения пломбы сократите/удалите окклюзионные взаимоотношения и повторно нанесите агезив на участки коррекции для защиты пломбы от высыхания.
Воспользуйтесь влажной тканью или ватным тампоном для удаления избытка агезива и окклюзионного слоя.

Гигиена и дезинфекция
Очистите все загрязненные флаконы с агезивом и активатором обычно используемыми средствами и дезинфицируйте их в соответствии с общепринятыми гигиеническими нормативами.

Указания
Single Bond Universal может полимеризоваться преждевременно в случае попадания под естественное или искусственное освещение. Во время применения избегайте воздействия интенсиного света.
Хранение и срок годности при хранении
Храните Single Bond Universal и Single Bond Universal DCA при температуре 02-25°C/36-77°F. Не использовать по истечении срока годности.
Информация для покупателя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантийные обязательства
Компания 3M Deutschland GmbH гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M Deutschland GmbH ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности
За исключение ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M Deutschland GmbH не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умноженные, случайные или опосредованные, независимо от выданных обязательств, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Информация по состоянию на февраль 2019 года
RUS. Уполномоченный представитель производителя в РФ: АО «3М Россия», 108811 г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-км, домол. 6, стр. 1, тел.: +7 495 784 74 74

