

 **Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:** 

Материал стоматологический фторсодержащий Clinpro White Varnish в наборах

Clinpro White Varnish – фторсодержащее покрытие, которое наносится на эмаль и дентин зубов. Содержит в своем составе запатентованный компонент – защищенный трикальцийфосфат (fTCP), а также 5%-ный фторид натрия. Действие fTCP обеспечивает образование сильного, кислотоустойчивого минерального состава твердых тканей зубов.

Назначение:

- Лечение гиперчувствительности зубов
- Лечение гиперчувствительности обнаженного дентина и поверхности корня

Преимущества:

- Снимает симптомы повышенной чувствительности зубов
- Имеет отличную текучесть, позволяющей материалу, растекаясь, покрывать апроксимальные и труднодоступные поверхности,
- Обладает адгезией к поверхности, на которую нанесен
- Простое и быстрое нанесение

Рекомендации по использованию:

1. Поверхность обрабатываемых зубов должна быть очищена, для этого подойдет чистка обычной зубной щеткой.
2. Откройте блистер Clinpro White Varnish и замешайте материал согласно рекомендациям по дозированию материала (см. в инструкции по применению материала).
3. Нанесите равномерный тонкий слой материала, делая горизонтальные движения кисточкой.
4. После нанесения Clinpro White Varnish попросите пациента закрыть рот и распределить покрытие по поверхности зубов языком.



Материал стоматологический фторсодержащий
Clinpro White Varnish в наборе малом

Артикул	Комплектация
12249	Clinpro White Varnish в наборе малом - Индивидуальная упаковка, содержащая блистер с материалом и кисточку для нанесения материала (50 шт.) - Блокнот для пациента (1 шт.) - Стикеры (60 шт.). Для дозирования материала
12250	Clinpro White Varnish в наборе большом - Блистеры с материалом (100 шт.) - Кисточки для нанесения материала (100 шт.) - Блокноты для пациента (2 шт.) - Стикеры (108 шт.). Для дозирования материала

Эль-Дент

* Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11540 от 07 февраля 2012 года, срок действия не ограничен.