

Винилполисилоксановые корригирующие оттискные массы



Перейти в магазин **ЭльДент** и заказать:

А-силиконовые корригирующие оттискные массы с разными степенями вязкости и временем затвердевания в картриджах для пистолета – диспенсера Garant

Назначение:

- Снятие любых точных оттисков, например при изготовлении следующих конструкций:
 - Коронки
 - Мостовидные конструкции
 - Вкладки и накладки
 - Штифтовые культевые вкладки

Преимущества:

- Оптимальный баланс клинически важных свойств
- Тиксотропность
- Повышенная гидрофильность и превосходная текучесть
- Эластичность в сочетании с очень высокой прочностью на разрыв – для извлечения оттиска без отрывов и оттяжек материала
- Почти 100% восстановление формы после растяжения, что практически исключает риск искажения оттиска
- Высокая пространственная стабильность
- Удобно и легко замешивается и дозируется с помощью пистолета-диспенсера Garant
- Благодаря отсутствию усадки модель можно многократно отливать в любой момент в течение 2 недель

Рекомендации по использованию масс Express XT:

- Вставьте тубы с материалом Express XT Penta Putty в картридж и аппарат
- Вставьте картридж с корригирующим материалом Express XT в пистолет-диспенсер Garant

Одноэтапная техника

- Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом (время высыхания 5-15 мин), удерживая смесительную насадку аппарата погруженной в массу
- Нанесите корригирующий материал из пистолета-диспенсера Garant на отпрепарированную область, медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания (3 мин)
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на время рекомендованное производителем раствора, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек



Материал оттискной винилполисилоксановый (VPS) Express XT: Express XT Light Body.

Артикул	Комплектация
36975*	Материал оттискной винилполисилоксановый (VPS) Express XT: Express XT Regular Body. Express XT Regular Body корригирующая масса в картриджах в составе: картриджи по 50 мл. (2 шт); насадки смесительные (10 шт.).
36974**	Материал оттискной винилполисилоксановый (VPS) Express XT: Express XT Light Body. Express XT Light Body корригирующая масса в картриджах в составе: картриджи по 50 мл. (не более 2 шт); насадки смесительные (не более 10 шт.).
36976***	Материал оттискной винилполисилоксановый (VPS) Express XT: Express XT Light Body Quick. Express XT Light Body Quick корригирующая масса в картриджах в составе: картриджи по 50 мл. (не более 2 шт); насадки смесительные (не более 10 шт.).
36799****	Материал стоматологический оттискной винилполисилоксановый Express Ultra-Light Body в наборе: картриджи (не более 4 шт. по 50 мл.); насадки смесительные желтые (не более 20 шт.).
Аксессуары	
77580	Пистолет-диспенсер Garant. 1:1/2:1 (для корригирующих масс 3М ESPE)
71452	Смесительные насадки Garant. Желтые для корригирующей массы Express XT (50 шт.).
71462	Наконечники Garant. Внутроротовые желтые (50 шт.) для корригирующей массы Express XT (50 шт.).

Двухэтапная техника

- Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом (время высыхания 5-15 мин), удерживая смесительную насадку аппарата погруженной в массу
- Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта через 3 мин, произведите очистку и просушите его
- Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т. д. и, при необходимости, сделайте отводные каналы
- Нанесите корригирующий оттискной материал из пистолета Garant на полученный базовый оттиск на соответствующую сторону и/или на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания корригирующего материала
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на время рекомендованное производителем раствора, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек

*РУ №ФСЗ 2008/01552 от 19.03.2012. Срок действия не ограничен

**РУ №ФСЗ 2008/01558 от 19.03.2012. Срок действия не ограничен

***РУ №ФСЗ 2008/01555 от 19.03.2012. Срок действия не ограничен

****РУ №ФСЗ 2010/07139 от 20.03.2012. Срок действия не ограничен