

## Цемент стоматологический для временной фиксации RelyX Temp NE в наборе

 **Перейти в магазин Эль.Дент и заказать:** 

Цемент для временной фиксации  
RelyX Temp NE - безэвгенольный цемент на  
основе оксида цинка

### Назначение:

- Фиксация любых временных конструкций
- Временная фиксация постоянных конструкций

### Преимущества:

- Лёгкость удаления излишков цемента при фиксации
- Оптимальное краевое прилегание временных конструкций за счёт малой толщины слоя (2 мкм)
- Высокая степень адгезии к тканям зуба в сочетании с лёгкостью снятия временной конструкции. Для облегчения снятия твердость цемента может быть снижена посредством добавления вазелина
- При снятии временной конструкции остатки цемента легко удаляются с тканей зуба (основная масса остается внутри самой конструкции)
- Не содержит эвгенола: не ингибирует затвердевание композитных реставрационных материалов и может применяться универсально, независимо от типа постоянного цемента
- Высокая прочность при жевательных нагрузках

### Рекомендации по использованию:

- Выдавите на блокнот одинаковое количество базовой пасты и катализатора
- Тщательно смешивайте пасты с помощью шпателя в течение 30 сек, пока смесь не станет однородной
- Нанесите на конструкцию тонкий слой цемента и зафиксируйте
- Удалите излишки цемента через 3:30 мин от начала смешивания

Рабочее время, включая замешивание: 1:30 мин

Время окончательного отверждения в полости рта: 3:30 мин



Цемент стоматологический для временной фиксации  
RelyX Temp NE в наборе

Артикул	Комплектация
56660	Цемент стоматологический для временной фиксации RelyX Temp NE в наборе: 1 базовая паста 1 катализатор (13 г) 1 блокнот для смешивания



\* Журнал The Dental Advisor удостоил цемент для временной фиксации RelyX Temp NE звания "Лучший временный цемент" (Top Temporary Cement) в 2010г.