




# Tray-Adhesive

## for A-Silicones

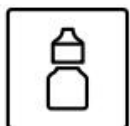

 Перейти в магазин [ЭльДент](#) и заказать: 

### Описание продукта

---

Ложечный адгезив для соединения А-силиконов с ложками из металла и пластмассы.

## Показания

---

Для адгезии силиконовых оттисковых материалов добавочного отверждения (PVS) к оттисковым ложкам с минимальной ретенцией или без ретенции (металл, пластмасса)

## Противопоказания

---

- ▶ Не используйте материал при наличии аллергии на какой-либо из компонентов композита или контактной аллергии, имеющей место в редких случаях.

## Основные меры предосторожности:

---

- Предназначено исключительно для применения в стоматологии!
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Не глотать! При случайном проглатывании проконсультируйтесь с врачом.
- Легко воспламеняется. Держать вдали от открытого огня.
- Не вдыхать пары. При случайном вдыхании проконсультируйтесь с врачом.
- Не допускайте попадания на кожу и в глаза. При случайном попадании немедленно промойте большим количеством воды и при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

## Побочные действия

---

На данный момент системных побочных действий обнаружено не было.

## Указания по применению:

---

- ▶ Оттисковые ложки из пластика следует проверить на совместимость с адгезивом.
- ▶ Проследите, чтобы поверхность оттисковой ложки была чистой, обезжиренной и сухой.

## Рекомендуемый способ применения:

---

1. С помощью кисточки нанесите тонкий, равномерный слой адгезива на внутреннюю поверхность оттисковой ложки.
2. Дайте адгезиву подействовать в течение 3:00 минут.
3. В течение последующих 30 минут заполните ложку оттисковой массой.

## Способ и сроки хранения

---

- ▶ Хранить при комнатной температуре (от 15 до 25 °C / от 59 до 77 °F)
- ▶ После использования бутылку необходимо тщательно закрыть.
- ▶ Не использовать по истечении срока годности!

## Утилизация

---

- ▶ Утилизация выполняется в соответствии с правилами, действующими на территории соответствующих стран.

## Состав

---

Силиконовая смола, растворители (летучие парафины)

## Форма продажи:

---

1 флакон с 10 мл жидкости	REF 909394
10 флаконов с 10 мл жидкости	REF 909396