

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аппарат стоматологический ThermaPrep 2 Oven для разогрева obturаторов с принадлежностями.

Аппарат стоматологический ThermaPrep 2 Oven для разогрева obturаторов с принадлежностями.

Аппарат стоматологический ThermaPrep 2 Oven для разогрева obturаторов с принадлежностями специально разработан для разогрева эндодонтических гуттаперчевых obturаторов Thermafil, WaveOne, ProTaper и др. Необходимо использовать печку только по назначению.



1. Подключите прибор к источнику питания 220 Вольт и включите выключатель на тыльной стороне прибора. Должен загореться зелёный светодиод «stand-by».
2. Поднимите лифт в верхнее положение, нажав на значок «стрелка из центра» и слегка придерживая пальцем.
3. Установите obturатор в держатель таким образом, чтобы силиконовый ограничитель находился под держателем.
4. Аккуратно опустите лифт вниз до щелчка, нажав на значок «стрелка в центр» в центре.
5. Нажмите кнопку размера obturатора «20-25», «30-60», «70-140» в зависимости от диаметра, затем нажмите кнопку «START left» или «right». Время разогрева устанавливается автоматически в диапазоне от 15 до 35 секунд.
6. После первого звукового сигнала obturатор готов к использованию.
7. Obturатор остается в готовом состоянии в течение 2 минут после первого сигнала. Печка поддерживает определённую температуру, и каждые 15 секунд подаёт звуковой сигнал. По истечении двух минут процесс разогрева прерывается.
8. Для прекращения процесса разогрева необходимо нажать горячий светодиод «START». Никогда не выключайте основной выключатель в процессе разогрева.
9. Если необходимо приготовить несколько obturаторов: активируйте разогрев в одной камере; после первого звукового сигнала извлеките obturатор, предварительно прекратив разогрев нажатием кнопки «START» и активируйте процесс разогрева в другой камере.
10. Осторожно извлеките obturатор из держателя и сразу же введите в канал, продвигая его в сторону апекса медленно и целенаправленно. Для предупреждения скручивания убедитесь в том, что продвижение идет по оси obturатора. При введении гуттаперча, покрывающая стержень obturатора, заполнит все латеральные каналы и

блокирует корневой канал до апекса. Через несколько секунд после достижения апекса следует применить давление.

Если нужно запломбировать несколько корневых каналов, используйте попеременно то левый, то правый держатели, что сэкономит ваше время.

Технические характеристики:

Питание 220/240 В, ~ 50-60 Гц

Мощность 210 ВА

Аппарат поставляется в индивидуальной упаковке, а также в составе наборов с obturаторами Thermafil, ProTaper и WaveOne.

Предупреждения

- Не разбирайте и не модифицируйте аппарат.
- Не допускайте воздействия какой-либо жидкости на аппарат.
- В работе системы могут возникнуть сбои при использовании прибора в пределах электромагнитного поля. Не устанавливайте прибор вблизи устройств, излучающих электромагнитные волны.
- Не используйте прибор в присутствии горючих продуктов.