

# LuxaForm



 [Перейти в магазин Эль-Дент и заказать](#) 



## Информационный листок

Русский

### Описание продукта

LuxaForm – термопластичный полимерный оттисковой материал.

### Показания

- Оттиски для временных реставраций

### Общие сведения по безопасности

- ▶ Только для стоматологического применения!
- ▶ Хранить в недоступном для детей месте!

### Взаимодействие с другими материалами

- Не использовать для временных мостов и коронок, содержащих метил-метакрилаты.

### Указания по применению

- В размягченном состоянии LuxaForm липнет к перчаткам. Всегда разминайте LuxaForm без перчаток. При внесении в ротовую полость смажьте пальцы перчаток вазелином.
- Для обеспечения безопасного удаления при выполнении оттиска не обжимайте LuxaForm слишком плотно вокруг зуба.
- Блокируйте все поднутрения подходящим материалом, например, воском.
- Не используйте LuxaForm для производства оттиска более чем с 5 зубов.
- При необходимости последующей обработки оттиска воспользуйтесь скальпелем.
- Оттиски сохраняют свою форму в течение нескольких месяцев и могут быть использованы повторно, например, при разрушении временных реставраций.

### Рекомендованное применение

1. Поместите материал LuxaForm (из расчета одна таблетка на один зуб), предварительно разогрев в горячей воде при 70 °С, пока материал не станет мягким и прозрачным (примерно 1 минута). Для множественного применения используйте большее количество таблеток. Становясь прозрачными, таблетки могут слипнуться друг с другом.
2. Придайте прозрачному материалу форму куба и обожмите им зуб.

**Обратите внимание!** После охлаждения материал снова затвердеет и приобретет непрозрачный синий оттенок. Ускорить охлаждение материала можно опрыскав его водой.

3. Снимите затвердевший материал LuxaForm с зуба и слегка смажьте его вазелином или другим изолирующим средством.

**Обратите внимание!** При использовании материалов для временных коронок и мостов, они не могут превышать их изначальную температуру, равную 25 °С.

4. Применяйте материал для временных коронок и мостов (например, Luxatemp Star), в обычном порядке.

### Ингредиенты

Поликапролактон, присадки, пигменты

### Хранение

- ▶ Хранить в сухом месте при комнатной температуре (15 - 25°C/59 - 77°F).
- ▶ Не использовать после истечения срока годности.

### Форма выпуска

Упаковка содержит 72 таблетки

REF 110415