

СОФТ-ЛАЙНЕР

МЯГКИЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

 [Перейти в магазин Эль Дент и заказать:](#) 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Временная перебазировка акриловых протезов.
Кондиционирование тканей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических реакций необходимо прекратить использование материала и обратиться к врачу соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПОДГОТОВКА

а) Тщательно очистите контактную поверхность с применением воды и пемзы и срежьте пластмассу в местах, подлежащих перебазировке.

2. ЗАМЕШИВАНИЕ

а) Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 2.2 г / 1.8 г (порошок по первое деление мерника, жидкость по 4 деление в шприце).

Примечание:

Можно изменять консистенцию материала, изменяя соотношение порошок/жидкость.

б) Поместите компоненты в стеклянный стаканчик и тщательно замешивайте в течение 30-60 секунд.

3. ПЕРЕБАЗИРОВКА

а) Максимально равномерно нанесите смесь на протез.

б) Установите протез во рту, дайте пациенту сомкнуть челюсти и оставьте протез в положении центральной окклюзии на 4-5 минут.

с) Извлеките протез и исследуйте его на предмет обнаружения дефектов.

д) Подержите протез в холодной воде и затем обрежьте излишки материала по краям, используя разогретый острый инструмент.

ХРАНЕНИЕ:

Храните в прохладном тёмном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

(Срок хранения 3 года).

УПАКОВКА

Упаковка 1-1: 100 г порошка, 100 г (97 мл) жидкости, аксессуары.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сразу после применения материала плотно закрывайте флаконы.

ВНИМАНИЕ

В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу соответствующей специализации.