

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛИРОВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ (СМОЛА) KERR

Моделировочная жидкость Kerr – агент для смачивания (метакрилат смолы), который позволяет улучшить адаптацию высоконаполненных композитных материалов к твердым тканям зуба, а также делает выполнение реставрации более удобным и комфортным.

Преимущества моделировочной жидкости

- Улучшение моделировочных свойств композита.
- Снижение риска возникновения «белой полосы».
- Отсутствие прилипания к инструментам.
- Отсутствие в составе растворителей (спирта, ацетона) и прекурсоров.
- Большой объем бутылочки и экономичное использование.
- Совместимость со всеми композитами.

Показания к применению

Моделирование реставраций всех классов.

Рекомендации по применению

1. Обмакните инструмент в смолу.
2. Обязательно удалите излишки о салфетку.
3. Проведите моделирование композита.

Моделировочную жидкость следует использовать умеренно. Обильное использование смолы может привести к нарушению адгезии.



Моделировочная жидкость (смола) Kerr 800-503

Моделировочная смола	800-503
1 бутылочка (10 мл)	