

# Eugenate Desobturator

Раствор для распломбирования корневых каналов, obturированных цинк-оксид-эвгенольными цементами и гуттаперчей.

**Состав** Апельсиновое масло.

## Описание

Препарат вызывает размягчение постоянных пломбировочных материалов для корневых каналов (цинк-оксид-эвгенольных цемента и гуттаперчи) и облегчает их механическое удаление.

## Показания

Дезобтурация корневых каналов, запломбированных цинкокси́дэвгенольными цементами и гуттаперчей.

## Способ применения

- ▶ Удалить пломбировочный материал из пульпарной камеры
- ▶ С помощью ватного шарика или пластиковой пипетки поместить небольшое количество препарата Eugenate desobturator на устья каналов
- ▶ Оставить на 1 минуту для достижения эффекта
- ▶ Смочить подходящий эндодонтический инструмент раствором препарата и механически удалить размягченный материал
- ▶ Повторять процедуру до тех пор, пока корневой канал не будет полностью дезобтурирован.
- ▶ Механически и медикаментозно обработать корневой канал перед новым пломбированием

## Предупреждение

При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки.



В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот водой и обратиться к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случае известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

## Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в защищенном от прямого света месте.

## Упаковка

Флакон 15 мл

АПТ

11555

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии