



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Перейти в магазин Эль-Дент и заказать:

## Iodoform Gauze

Повязка для лечения постэкстракционных лунок

### Состав

5% бинт йодоформный: 100 г бинта смоченного в 5 г йодоформа;

### Свойства

Iodoforme gauze обладает мягким анестезирующим и антисептическим действием. Взаимодействуя с раневым экссудатом и жирными кислотами, йодоформ выделяет свободный йод, который в комплексе с белками обладает выраженным бактерицидным действием.

### Показания

- > профилактика периодонтальной инфекции;
- > постэкстракционная дезинфицирующая повязка;
- > дезинфекция синусов верхней челюсти.

### Указания по применению

Отрезать бинт необходимой длины для закрытия постэкстракционной лунки и аккуратно поместить в полость для лечения. Бинт не резорбируется и может оставаться на срок от 2 до 8 дней до удаления.

### Упаковка

флакон, содержит пропитанный бинт шириной 22 мм и длиной 5 м

### Упаковка

5% йодоформом  
10% йодоформом



- > для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ в СТОМАТОЛОГИИ
- > ПРОИЗВОДСТВО ШВЕЙЦАРИИ