

### *Инструкция по применению*

#### **Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов**

#### **«Гуттапласт»**

**по ТУ 9391-040-49908538-2008**

РУ № ФСР 2009/05725 от 24.09.2009

#### **Показания и свойства**

Перелечивание корневых каналов, ранее пломбированных гуттаперчей.

В случаях повторного пломбирования корневого канала применяют специальную жидкость для распломбирования канала, запломбированного гуттаперчей, облегчающую проведение подобных манипуляций.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

#### **Состав**

Эвкалиптол

Цитраль

#### **Способ применения**

##### **Метод для распломбирования каналов при одном посещении.**

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести две капли жидкости в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 мин. с целью размягчения гуттаперчи.

Затем удалить размягченную гуттаперчу с помощью эндодонтического инструмента для обработки корневых каналов, пока не будет достигнут апекс. Периодически нужно добавлять свежий растворитель и промывать канал гипохлоритом натрия.

##### **Метод для распломбирования каналов при двух посещениях.**

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью для распломбирования и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной гуттаперчи механическим путем. Это не будет представлять особой трудности. После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

**Меры предосторожности.** Исключить попадание в пищевод.

**Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.**

#### **Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### **Форма выпуска и комплектация**

Жидкость (стеклянный флакон) 13 мл – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

#### **Условия хранения**

Меры предосторожности. Жидкость воспламеняема. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C вдали от источников возгорания.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### **Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.