



ной улыбки

 Перейти в магазин [Эль Дент](#) и заказать: 

NSK PROPHY MATE CLEANING POWDER



NSK

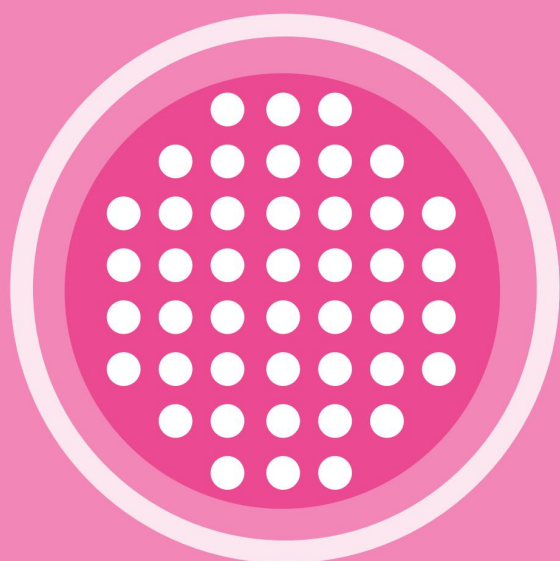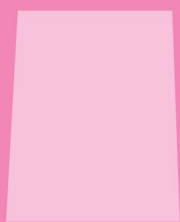

FLASH pearl



ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

NSK

Prophy-Mate **neo**



Эль-Дент

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Для идеаль



Prophy-Mate
neo



Пневматическая система полировки поверхности зуба

Усовершенствованная система Prophy-Mate neo – это удобство форм и отличная функциональность. Легкость, прекрасная балансировка, компактная камера для порошка, наконечник NSK, вращающийся на 360° даже при высоком давлении, делают данную систему отличным инструментом для врача. Данная система сокращает время снятия зубного камня и налета. Имеются насадки с углом 60° и 80°.

Использование

- Удаление зубного камня и отбеливание
- Протравка эмали, дентина и фарфора перед цементированием
- Подготовка к заполнению трещин и дупел

Преимущества


- Прочность и надежность
- Простота в использовании
- Простое обслуживание
- Быстрое подключение к известным турбинным переходникам
- Возможность выбора насадок 60° и 80°



Характеристики




Эргономичный комфортный дизайн
Легкий, компактный дизайн и хорошо продуманный весовой баланс обеспечивают простое применение при минимальных нагрузках запястья, способствуя таким образом проведению тщательного лечения.

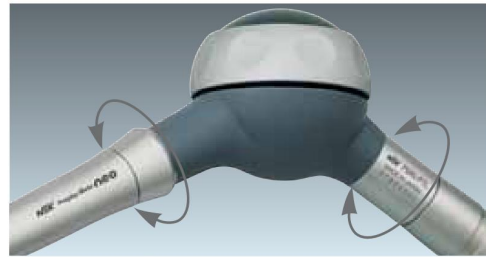

Плавный, свободный поворот на 360°
Два шарнирных соединения, вращающихся на 360°, повышают удобство использования, гибко реагируя на движения кончиков пальцев и регулируя угол наклона насадки без усилия.




Простое крепление с помощью одного движения руки
Prophy-Mate neo специально сконструирован для удобного и простого крепления напрямую на переходники NSK, а также для использования с большинством переходников известных мировых производителей. Наконечник также легко подсоединяется к резервуару для порошка.

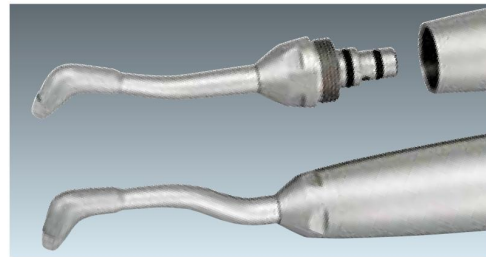

Легкосъемные насадки к наконечникам с углом 60° и 80°
Насадки с углом изгиба 60° или 80° максимально улучшают процесс лечения. Насадки с углом 60° применяются в молярной и окклюзионной области, а насадки с углом 80° – для передних зубов.



Улучшенные полирующие качества
Оригинальные двойные сопла NSK обладают большей мощностью для полирования зубов. За счет мощного потока продолжительность использования значительно снижается, сокращая время лечения.

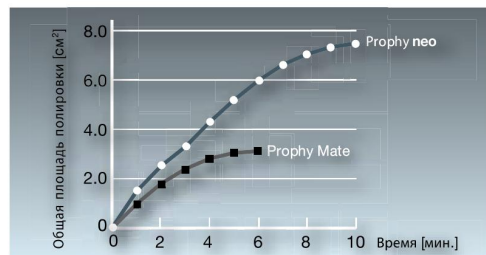

Стабильная мощность
Благодаря мощным двойным соплам от NSK Prophy-Mate neo работает со стабильной мощностью, что сокращает время лечения.

Комплектация Prophy-Mate neo

*Прямое подсоединение к данным переходникам.

ТИП ПЕРЕХОДНИКА	NSK	Kavo®	Sirona®	W&H®
МОДЕЛЬ	PMNG-PTL-P	PMNG-KV-P	PMNG-SR-P	PMNG-WH-P
КОД ЗАКАЗА	Y135029	Y135030	Y135031	Y135032
ТИП ПЕРЕХОДНИКА	Bien-Air®	M4	B2	
МОДЕЛЬ	PMNG-BA-P	PMNG-M4-P	PMNG-B2-P	
КОД ЗАКАЗА	Y135033	Y135034	Y135035	

Комплектация:
 • Наконечник Prophy-Mate neo с насадками 60° или 80°
 • Чистящая щетка, мандрен и файл
 • 5 пакетиков чистящего порошка FLASH real по 15 гр.
 • Сменная насадка
 • Крышка от резервуара с порошком
 • Ключ для замены насадки

*Не обрабатывайте резервуар для порошка и крышку резервуара в термодезинфекторе.



Наконечник системы вместе с насадкой (без резервуара) можно промывать в термодезинфекторе.



Автоклавирование при температуре до 135° С.



Блестящие результаты при каждом применении

FLASH pearl – это чистящий порошок для Prophy-Mate neo с округлыми гранулами, разработанный для плавного перемещения по поверхности зубов и проникновения во все труднодоступные места для быстрой очистки. Сферическая форма порошковых гранул уменьшает вероятность разрушения зуба и мягких тканей во время удаления пятен и камня и действует быстро и безопасно. Основа FLASH pearl – это кальций, имеющий естественный вкус. Порошок не формирует массы, забивающей насадку, поэтому Prophy-Mate neo прост в обслуживании. FLASH pearl также снижает кислотность ротовых жидкостей и препятствует развитию бактерий, одновременно уменьшая образование зубного камня. Этот продукт идеален для очистки зубов пациентов, чувствительных к бикарбонату натрия или страдающих от повышенной чувствительности.

* Побочные эффекты у данного продукта не обнаружены.

- Упакован в оригинальную удобную коробку
- Содержит 100 пакетиков по 15 граммов

МОДЕЛЬ **FLASH pearl**
КОД ЗАКАЗА **Y900693**



- 4 бутылки, упакованные в коробку
- В комплекте мерный стаканчик
- Емкость каждой бутылки – 300 г


МОДЕЛЬ **FLASH pearl (бутыл)**
КОД ЗАКАЗА **Y900698**

Преимущества

- Эффективный • Быстрый результат
- Мягкий и нежный • Naturalный вкус без примеси соды
- Биоразлагаемый и некомкающийся
- Подходит к полировочным системам всех производителей

Сферические гранулы удаляют остатки пищи из всех труднодоступных уголков

Гранулы FLASH pearl маленькие и имеют сферическую форму в отличие от частиц порошка бикарбоната натрия. Это обеспечивает лучший контакт и доступ ко всем очищаемым поверхностям. Более направленный угол действия также обеспечивает большую безопасность при обработке.

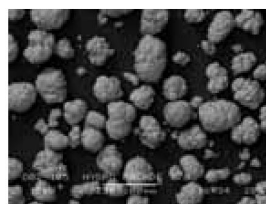


FLASH pearl



Обычный порошок бикарбоната натрия

Новая эффективная система очистки!

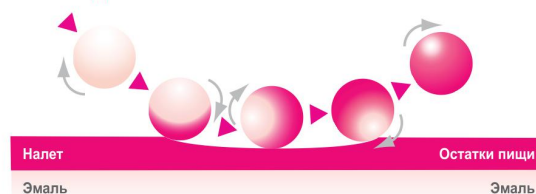

FLASH pearl плавно перемещается по поверхности зубов

Сферическая форма FLASH pearl полирует зубную поверхность в отличие от эффекта острых частиц бикарбоната натрия. FLASH pearl полирует зубы до блеска без вреда для зубной эмали.




Повреждения отсутствуют
FLASH pearl не повреждает поверхность



Повреждение эмали
Обычный порошок бикарбоната натрия агрессивен для зубной поверхности



Простое обслуживание

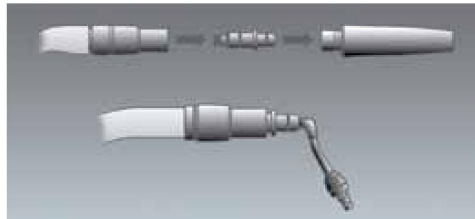

Профилактика с применением насадки для прочистки воздухом предотвращает засорение. Насадка для прочистки воздухом доступна для всех типов соединений. Также в комплект входит чистящая щеточка и мандрен.

Запчасти

PMN-HP • Наконечник (с насадкой 60°)



• Код заказа
T797010

PMNG-PTL • Под разъем NSK



• Код заказа
T798020

PMNG-KV • Под разъем KaVo® MULTIflex® LUX



• Код заказа
T886020

PMNG-SR • Под разъем Sirona®



• Код заказа
T887020

PMNG-WH • Под разъем W&H® Roto Quick



• Код заказа
T888020

PMNG-BA • Под разъем Bien-Air® Unifix®



• Код заказа
T889020

PMNG-M4 • Под разъем Midwest 4



• Код заказа
T884020

PMNG-B2 • Под разъем Borden 2 / 3



• Код заказа
T885020

Крышка для резервуара с чистящим порошком (neo)



• Код заказа
T798133

Прокладка (neo)



• Код заказа
T798135

Комплект уплотнительных колец PTL
• (5 штук в упаковке)



• Код заказа
Y900580

Комплект уплотнительных колец PM
• (3 штуки в упаковке)



• Код заказа
Y900054

Переднее уплотнительное кольцо для носика



• Код заказа
0312039070

Заднее уплотнительное кольцо для носика



• Код заказа
0312029070

Насадка 60° (neo)



• Код заказа
T797012

Насадка 80° (neo)



• Код заказа
T797013

Ключ для насадок (neo)



• Код заказа
T797601

Насадка для продувки – PTL (neo)



• Код заказа
T798094

Насадка для продувки – KV (neo)



• Код заказа
T886094

Насадка для продувки – SR (neo)



• Код заказа
T887094

Насадка для продувки – WH (neo)



• Код заказа
T888094

Насадка для продувки – BA (neo)



• Код заказа
T889094

Насадка для продувки – M4 (neo)



• Код заказа
T844094

Насадка для продувки – B2 (neo)



• Код заказа
T885094

Масло для смазки



• Код заказа
Z016112

Мандрен (neo)



• Код заказа
T798091

Чистящий файл (длинный) (neo)



• Код заказа
T798095

Чистящий файл (короткий) (neo)



• Код заказа
T798092

Чистящая щетка (neo)



• Код заказа
T798093



Обработка в термодезинфекторе.



Автоклавирование при температуре до 135° С.

Рекомендуемое положение насадки



Более эффективная очистка достигается при расположении насадки под углом от 10° до 60° на расстоянии 3-5 мм от поверхности зуба. Данная позиция отличается от позиции чистки обычными порошками: вращение и адсорбция сферических гранул порошка FLASH pearl оптимальны при сохранении положения насадки под данным углом. Распыление может быть направлено от межзубного пространства на цервикальную границу зубов.

Спецификация Prophy-Mate neo

■ Наконечник с насадкой 80°
Длина: 173,9 мм Вес: 134,9 г

■ Наконечник с насадкой 60°
Длина: 171,4 мм Вес: 134,8 г