


Kerr™

Профессиональная гигиена и профилактика

Пасты и аксессуары для процедуры профессиональной чистки



Cleanic® Light

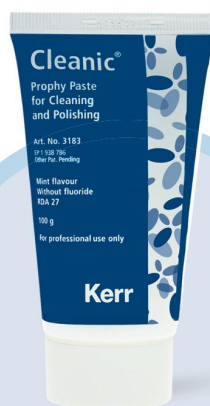

Cleanic® Mint Fluoride-Free



Аксессуары



Cleanic®



Pro-Cup®


Чистящие и полирующие пасты

Cleanic® – паста для профессиональной гигиенической чистки


Cleanic® – универсальная паста для чистки и полировки, имеющая изменяемую абразивность.

Содержание перлита, относящегося к группе вулканических риолитов или кварцевых порфировых стекол, делает профилактическую пасту Cleanic® уникальной.

Высокоэффективная и в то же время щадящая структуру зуба, с низким значением RDA – всего 27, паста Cleanic® обеспечивает объединенное переменное действие чистки и полировки: в первые несколько секунд применения (около 7 сек.) паста проявляет максимальный очищающий эффект. Преобразование крупнозернистых частиц перлита в мелкозернистые и сглаживание их краев за 15 сек. превращает Cleanic® в полирующую пасту с сильным эффектом придания блеска.

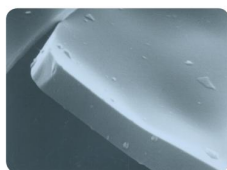

Частицы перлита до начала чистки

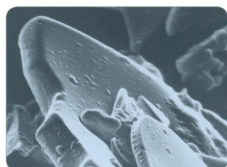

Частицы перлита после 15 сек. чистки



Мятный вкус

Вкус зеленого яблока (без ментола)



До чистки с Cleanic®



После чистки с Cleanic®

Клинический случай предоставлен доктором О. Мельниковой



До чистки с Cleanic®



Чистка с помощью пасты Cleanic®, чашечек Pro-Cup® и ретрактора OptiView™



После чистки с Cleanic®

Клинический случай предоставлен доктором Арне Лундом


Особенности и преимущества Cleanic®

- Экономия времени и простота использования благодаря использованию одной пасты для чистки и полировки: очистка поверхности в течение первых 7 сек. и последующая полировка до блеска (еще 8 сек.).
- Эффективная полировка поверхности зуба и снижение скорости появления нового налета.
- Высокая эффективность при низкой абразивности (RDA 27).
- Полирование и сглаживание зубной эмали без ее повреждения благодаря низкой абразивности.
- Возможность выбора вкуса (мятный, яблочный), что особенно важно на детском приеме.
- Наличие пасты без вкуса и искусственных красителей для пациентов с аллергией.
- Наличие паст с фторидом и без него. Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия (кроме Cleanic® Mint Fluoride-Free и Cleanic® без фтора в картриджах).
- Удобство проведения чистки при использовании специальных колец.
- Экономичность использования пасты в тубе (100 г).
- Экономичное расходование пасты вместе с чашечками Pro-Cup®.
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex® или AirFlow®).
- При наличии эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта возможно применение пасты со вкусом зеленого яблока благодаря отсутствию в ней ментола.

Cleanic® Mint Fluoride-Free

Паста Cleanic® Mint Fluoride-Free не содержит фторид и прекрасно подходит для проведения общей профилактической чистки, непосредственно предшествующей процедуре реставрации, а также ортодонтическим процедурам (в отличие от паст, содержащих фторид, использование которых может негативно сказаться на качестве реставрации из-за химической реакции с адгезивами).

Cleanic® Mint Fluoride-Free также подходит пациентам, страдающим флюорозом.

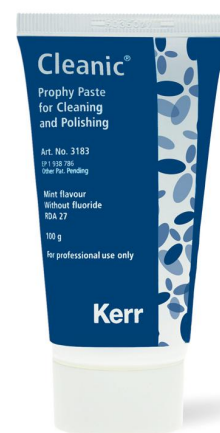

Cleanic® Light

- Решение для пациентов с аллергией.
- Без красителей.
- Без вкусовых добавок.



Информация для заказа

Cleanic® в тубе	
Туба пасты Cleanic® с мятным вкусом с фтором (100 г)	3180
Туба пасты Cleanic® со вкусом зеленого яблока с фтором (100 г)	3182
Туба пасты Cleanic® Mint Fluoride-Free с мятным вкусом без фтора (100 г)	3183
Туба пасты Cleanic® Light без вкуса и искусственных красителей (100 г)	3184
Унидозы Cleanic® с фтором	
200 унидоз по 2 г, 3 чашечки.	3140
Содержание фторида натрия (NaF) – 0,10%	

Упаковки Cleanic®	
Картридж пасты Cleanic® с фтором (200 г), 8 клипс Prophy, 3 шпателя	3100
Картридж пасты Cleanic® без фтора (200 г), 8 клипс Prophy, 3 шпателя	3200
Картридж пасты Cleanic® с фтором (100 г)	3110
Картридж пасты Cleanic® без фтора (100 г)	3210
Тест-упаковка пасты Cleanic® с фтором (100 г)	3130
Тест-упаковка пасты Cleanic® без фтора (100 г)	3230

CleanPolish и SuperPolish

Пасты для чистки зубов перед реставрацией и для полировки реставрации – традиционная двухшаговая система паст без фтора

Первый шаг – CleanPolish: паста, которая быстро и эффективно очищает как естественные ткани зубов, так и реставрации из композитов и металлов. На основе пемзы (более абразивная, нежели Cleanic®). RDA: 43.8 – REA 5.5

Второй шаг – SuperPolish: придает зеркальный блеск как естественным тканям зубов, так и реставрациям из композитов и металлов. Не содержит пемзу. RDA: 9.8 – REA: 4.5

Особенности и преимущества CleanPolish и SuperPolish

- Эффективная очистка естественных тканей зубов, композитных и металлических реставраций и успешное применение для полировки реставраций.
- Более высокая абразивность чистящей пасты (по сравнению с пастой Cleanic®) и более быстрое достижение видимых результатов чистки.
- Традиционная двухшаговая система, не требующая обучения применению.
- Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии) благодаря отсутствию фторидов.
- Экономичная система.

Информация для заказа

CleanPolish и SuperPolish	
Туба пасты CleanPolish без фтора и анисовой отдушки (50 г)	360
Туба пасты SuperPolish без фтора и анисовой отдушки (45 г)	361
1 CleanPolish 50 г (арт. 360), 1 SuperPolish 45 г (арт. 361), 20 щеточек из натуральных волокон (арт. 831 RA)	831 CLID
1 CleanPolish 50 г (арт. 360), 1 SuperPolish 45 г (арт. 361), 20 щеточек из нейлоновых волокон (арт. 835 RA)	835 CLID



CleanPolish (360)



SuperPolish (361)

Роторасширитель OptiView™

Особенности и преимущества OptiView™

- Хорошая ретракция и оптимальный доступ к операционному полю благодаря одновременной фиксации щек и губ.
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении.
- Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирования.
- Максимальный комфорт для пациента благодаря анатомической форме, прорезям для уздечек верхней и нижней губ и мягким подушечкам, не давящим на переходную складку.
- Отсутствие талька и возможность применения при хирургических вмешательствах.
- Простота и легкость установки и извлечения.
- Успешное применение на детском приеме. Доступность в двух размерах – в стандартном (белом) и маленьком (голубом).



OptiView™ (5500)



OptiView™ (5502)

Информация для заказа

Набор OptiView™ стандартного размера	
2 держателя для губ и щек с подушками для губ	5500
Набор OptiView™ маленького размера	
2 держателя для губ и щек с подушками для губ	5502

Аксессуары для чистки и полировки

Pro-Cup® и Pro-Cup® Junior



Чашечки для чистки и полировки

Безлатексные резиновые чашечки Pro-Cup® обеспечивают эффективную очистку поверхности зуба и экономичное использование профилактической пасты без разбрызгивания. Благодаря свойствам материала с низким коэффициентом трения не происходит перегрева тканей зуба.

Мягкие (голубые) и жесткие (темно-синие) чашечки Pro-Cup® – одноразовые и позволяют избежать перекрестного заражения и повторной обработки.

Чашечки Pro-Cup® Junior рекомендованы для профилактической чистки у детей и в ситуациях, когда доступ к ротовой полости ограничен.

Различные варианты выпуска облегчают выбор оптимального инструмента для чистки и полировки в зависимости от клинической ситуации и предпочтений стоматолога.

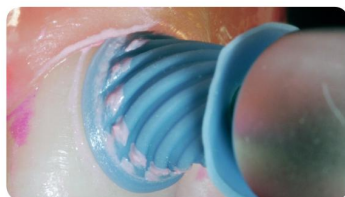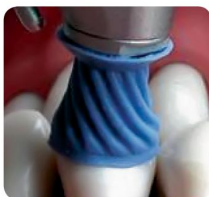

Фотография предоставлена доктором О. Мельниковой

Особенности и преимущества Pro-Cup® и Pro-Cup® Junior

- Экономичность нанесения пасты.
- Наличие 2 вариантов – жесткие (синего цвета) и мягкие (голубого цвета) чашечки.
- Возможность использования при проведении чистки у пациентов с очень чувствительными деснами и тонкой эмалью более мягкими чашечками голубого цвета.
- Щадящая чистка в области десны и межзубных промежутков без травмирования десны.
- Меньшая болезненность процедуры чистки для пациента благодаря снижению нагревания зуба.
- Возможность использования для пациентов с аллергией на латекс.
- Защита роторной группы.
- Аккуратность проведения процедуры благодаря нанесению пасты без разбрызгивания.
- Возможность применения на детском приеме благодаря небольшим размерам чашечек Pro-Cup® Junior.
- Отличное удаление налета и налета Пристли у детей.

Информация для заказа

Жесткость и цвет чашечки	Количество в упаковке, шт.	Pro-Cup®		Pro-Cup® Junior	
		Screw-Type	Latch-Type	Screw-Type	Latch-Type
Мягкие голубые	30	1810/30	990/30	1812/30	992/30
	120	1810/120	990/120	1812/120	992/120
Жесткие темно-синие	30	1811/30	991/30	1813/30	993/30
	120	1811/120	991/120	–	993/120

Миниатюрные чистящие и полирующие щеточки

Hawe Miniature

Щеточки Hawe Miniature – самые миниатюрные щеточки для чистки и полировки, являющиеся абсолютным лидером по качеству и исполнению.



Натуральная щетина



Нейлоновая щетина

Pro-Brush

Pro-Brush – миниатюрная одноразовая щеточка для чистки и полировки, легко узнаваемая по голубой полимерной чашечке, которая предотвращает появление царапин на поверхности реставрации при случайном соприкосновении.



Натуральная щетина



Нейлоновая щетина

Информация для заказа Hawe Miniature

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 10 шт.	831 RA
Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 100 шт.	831/100
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 10 шт.	835 RA
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 100 шт.	835/100

Информация для заказа Pro-Brush

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 10 шт.	841 RA
Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 100 шт.	841/100
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 10 шт.	845 RA
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 100 шт.	845/100

Kerr™