

## Штифты стоматологические стекловолоконные RelyX Fiber Post, корневая развертка RelyX Fiber Post Drill, развертка/расширитель каналов RelyX Fiber Post Drill

### Назначение:

- В случае недостаточной сохранности тканей зуба для дополнительной ретенции прямой реставрации
- В случае недостаточной сохранности тканей зуба для дополнительной ретенции непрямой реставрации

### Преимущества:

- Высокая прочность
- Отличная рентгеноконтрастность
- Отличная светопроводимость
- Удобное решение при использовании совместно с цементом самоадгезивным универсальным композитным для фиксации RelyX U200

### Рекомендации по использованию:

- Припасуйте штифт плотно в подготовленном корневом канале. Не должно быть заще姆лений, и он должен легко выниматься из канала
- Укоротите штифт вне полости рта до нужной длины с помощью алмазного диска и пылесоса
- Прозеинфицируйте его спиртом и высушите воздухом, не содержащим масла
- Обработайте корневой канал 3% гипохлоритом натрия, промойте водой и высушите бумажными штифтами (не используйте перекись водорода для обработки канала!)
- Зафиксируйте штифт на самоадгезивный композитный цемент двойного отверждения (рекомендуем цемент RelyX U200)
- При использовании многошаговых композитных систем следуйте инструкциям производителя



Штифты стоматологические стекловолоконные RelyX Fiber Post



Артикул	Комплектация
	<b>Стекловолоконные штифты RelyX Fiber post</b>
56869	10 стекловолоконных штифтов, размер 1 (диаметр 1,3 мм)
56870	10 стекловолоконных штифтов, размер 2, (диаметр 1,6 мм)
56871	10 стекловолоконных штифтов, размер 3, (диаметр 1,9 мм)
	<b>Корневая развертка RelyX Fiber Post Drill, развертка/расширитель каналов RelyX Fiber Post Drill</b>
56864	1 корневая развертка, размер 1
56865	1 корневая развертка, размер 2
56866	1 корневая развертка, размер 3
56867	1 расширитель для прохождения каналов, универсальный