

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХИХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт на слюноотсос стоматологический одноразовый «КРИСТИДЕНТ» (со съёмным наконечником)

Слюноотсос стоматологический одноразовый «КРИСТИДЕНТ» со съёмным наконечником предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- **Вид:** Со съёмным наконечником
- **Длина:** 150 мм
- **Цвета:** бесцветный, голубой, зеленый, желтый, фиолетовый, бордовый
- **Диаметр:** 6,5 мм
- **Упаковка:** 100 шт. в п/э пакете
- **Транспортная коробка:** 30 или 50 упаковок




- **Область применения:** применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях

Инструкция по применению:

1. Согните трубку под необходимым углом
2. Соедините слюноотсос стороной без наконечника к аспирационной системе стоматологической установки.
3. Поместите слюноотсос стороной наконечника в ротовую полость пациента для работы.
4. Для подключения аспирационных наконечников к трубкам аспирационной системы стоматологической установки с диаметром 6,5 мм необходимо отдельно приобрести переходник «Мини»: для аспирационных наконечников с $d = 6,5$ мм или аналогичный переходник от другого производителя.

- **Срок годности:** 5 лет.
- **Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по** ТУ 9398-001-66368948-2015
- **ОКП:** 939800
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4053 от 11.05.2016г.
- **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор
ООО «Кристи»

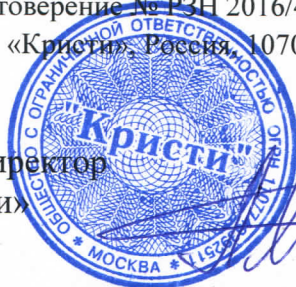

Мнацаканян А.М.